

Innova Pharm

L'EXPERTISE FONCTIONNELLE DEPUIS 1999



FABRICATION FRANÇAISE

Nos dispositifs sont fabriqués en France à partir de matériaux de grade médical, conformes aux standards internationaux (FDA, USP Classe VI), pour une utilisation sûre et maîtrisée.
Formulés sans bisphénols ni phtalates.

Plus de
28 ans
d'expertise

Plus de
80 dispositifs
de rééducation
oro-myofonctionnelle

Jusqu'à
5 densités
pour un confort
patient optimal

Conseils et indications



Adaptation au dispositif

Une sensibilité des dents antérieures peut apparaître au réveil. Elle est transitoire, disparaît rapidement et témoigne de l'action du dispositif sur le bloc incisivo-canin. Lors des premières semaines (jusqu'à environ 4 semaines), il est fréquent que le patient perde sa gouttière pendant la nuit. Ce phénomène est normal : la rééducation fonctionnelle nécessite du temps et de la persévérance. Les dispositifs sont déconseillés en cas d'apnées du sommeil.

Nettoyage des dispositifs



- ▶ Nettoyer le dispositif avant chaque mise en bouche et après chaque retrait à l'aide d'une brosse à dents souple dédiée et d'un nettoyant doux (dentifrice, savon neutre...).
- ▶ Brosser délicatement l'ensemble des surfaces, puis rincer soigneusement à l'eau claire.
- ▶ En complément, une fois par semaine, laisser tremper le dispositif pendant 30 minutes dans un récipient contenant de l'eau additionnée de bain de bouche ou d'une solution équivalente.
- ▶ Après trempage, procéder à un nouveau brossage, puis rincer abondamment à l'eau claire avant utilisation.
- ▶ Sécher soigneusement le dispositif avant de le ranger dans son étui, en veillant à ce que celui-ci reste propre.

Stérilisation



L'Écran et le Déglutix peuvent être stérilisés à l'autoclave à 134 °C en cycle PRION.

Ne jamais faire bouillir le dispositif.

Hygiène et précautions



Une mauvaise hygiène buccale ou un entretien insuffisant du dispositif et de son étui peuvent entraîner des réactions inflammatoires. Il est essentiel de maintenir une hygiène rigoureuse tout au long du traitement.

Une gamme pensée pour accompagner la rééducation oro-myofonctionnelle

SOMMAIRE

DISPOSITIFS DE PREMIÈRE INTENTION ET D'EXERCICE	8
Rééducation de la ventilation et de la déglutition	
ÉCRAN	10
DÉGLUTIX	12
DISPOSITIFS D'INTERCEPTION	14
Correction des dysfonctions oro-myofonctionnelles	
CLASSE I	18
CLASSE II	20
GOUTTIÈRE CFP	22
GOUTTIÈRE CARRÉE	23
CLASSE III	24
DISPOSITIFS AUXILIAIRES AUX TRAITEMENTS	26
Accompagnement des traitements orthodontiques	
GOUTTIÈRE ALIGNEUR	28
GOUTTIÈRE BAGUES	29
DISPOSITIFS DE CONTENTION	30
Maintien des résultats	
PROCCLUSEUR	32

Légende



Âge minimum recommandé



Observation clinique



Compatible avec un traitement orthodontique



Port de jour



Port de nuit

Tarifs ⁽¹⁾

- ✓ Prix dégressifs & panachages possibles toute l'année ⁽²⁾
- ✓ 1 dispositif OFFERT par dizaine commandée ⁽³⁾
- ✓ Frais de port offerts dès 10 dispositifs commandés ⁽⁴⁾

DISPOSITIFS DE PREMIÈRE INTENTION ET D'EXERCICE

ÉCRAN ⁽⁵⁾					
Taille	Densité	x5	x20	Page	
3-6 ans		13 €	12 €	10	
6 ans et +		13 €	12 €	10	
6 ans et +	RIGIDE	13 €	12 €	10	
3-6 ans	AVEC BUTÉE	14 €	13 €	11	
6 ans et +	AVEC BUTÉE	14 €	13 €	11	

DÉGLUTIX						
Taille	Coloris	Unité	x5	x20	Page	
3-6 ans	Bleu	35 €	25 €	22 €	12	
3-6 ans	Rose	35 €	25 €	22 €	12	
3-6 ans	Orange	35 €	25 €	22 €	12	
6 ans et +	Bleu	35 €	25 €	22 €	12	
6 ans et +	Rose	35 €	25 €	22 €	12	
6 ans et +	Orange	35 €	25 €	22 €	12	
6 ans et +	Bleu	À PISTES	35 €	25 €	13	
6 ans et +	Rose	À PISTES	35 €	25 €	13	
6 ans et +	Orange	À PISTES	35 €	25 €	13	
XL	Bleu	35 €	25 €	22 €	12	
XL	Rose	35 €	25 €	22 €	12	
XL	Orange	35 €	25 €	22 €	12	

DISPOSITIFS D'INTERCEPTION

CLASSE I									
Taille	Densité	Unité	x5	x10	x20	x50	x100	Page	
S	SOUPLE	39 €	35 €	30 €	28 €	25 €	23 €	18-19	
S	MÉDIUM	39 €	35 €	30 €	28 €	25 €	23 €	18-19	
S	RIGIDE	39 €	35 €	30 €	28 €	25 €	23 €	18-19	
M	SOUPLE	39 €	35 €	30 €	28 €	25 €	23 €	18-19	
M	MÉDIUM	39 €	35 €	30 €	28 €	25 €	23 €	18-19	
M	RIGIDE	39 €	35 €	30 €	28 €	25 €	23 €	18-19	
M	SOUPLE MÉDIUM	46 €	42 €	39 €	35 €	33 €	31 €	18-19	
M	MÉDIUM RIGIDE	46 €	42 €	39 €	35 €	33 €	31 €	18-19	
L	SOUPLE	39 €	35 €	30 €	28 €	25 €	23 €	18-19	
L	MÉDIUM	39 €	35 €	30 €	28 €	25 €	23 €	18-19	
L	RIGIDE	39 €	35 €	30 €	28 €	25 €	23 €	18-19	
XL	SOUPLE	39 €	35 €	30 €	28 €	25 €	23 €	18-19	
XL	MÉDIUM	39 €	35 €	30 €	28 €	25 €	23 €	18-19	

CLASSE II									
Taille	Densité	Unité	x5	x10	x20	x50	x100	Page	
S	SOUPLE	39 €	35 €	30 €	28 €	25 €	23 €	20-21	
S	MÉDIUM	39 €	35 €	30 €	28 €	25 €	23 €	20-21	
S	RIGIDE	39 €	35 €	30 €	28 €	25 €	23 €	20-21	
S	SOUPLE MÉDIUM	46 €	42 €	39 €	35 €	33 €	31 €	20-21	
S	MÉDIUM RIGIDE	46 €	42 €	39 €	35 €	33 €	31 €	20-21	
M	SOUPLE	39 €	35 €	30 €	28 €	25 €	23 €	20-21	
M	MÉDIUM	39 €	35 €	30 €	28 €	25 €	23 €	20-21	
M	RIGIDE	39 €	35 €	30 €	28 €	25 €	23 €	20-21	
M	SOUPLE MÉDIUM	46 €	42 €	39 €	35 €	33 €	31 €	20-21	
M	MÉDIUM RIGIDE	46 €	42 €	39 €	35 €	33 €	31 €	20-21	
L	SOUPLE	39 €	35 €	30 €	28 €	25 €	23 €	20-21	
L	MÉDIUM	39 €	35 €	30 €	28 €	25 €	23 €	20-21	
L	RIGIDE	39 €	35 €	30 €	28 €	25 €	23 €	20-21	
L	SOUPLE MÉDIUM	46 €	42 €	39 €	35 €	33 €	31 €	20-21	
L	MÉDIUM RIGIDE	46 €	42 €	39 €	35 €	33 €	31 €	20-21	
XL	SOUPLE	39 €	35 €	30 €	28 €	25 €	23 €	20-21	
XL	MÉDIUM	39 €	35 €	30 €	28 €	25 €	23 €	20-21	

⁽¹⁾ Nos tarifs sont indiqués en € TTC sauf modification des taxes en vigueur (TVA notamment et/ou modification du prix de vente). Prix valables à partir du 1^{er} octobre 2026 et pouvant varier en cours d'année en cas d'évolution des taxes applicables et des circonstances économiques. Avant toute commande, consulter la mise à jour de nos prix sur le site www.innovapharm.fr.

⁽²⁾ Les panachages sont possibles entre les dispositifs ayant un prix identique.

⁽³⁾ Bénéficiez d'un dispositif offert par dizaine commandée.

⁽⁴⁾ Frais de port offerts en France métropolitaine à partir de 10 dispositifs commandés. Offre valable uniquement sur les dispositifs. Offre non cumulable.

⁽⁵⁾ Les Écrans sont vendus par 5 pièces minimum.

GOUTTIÈRE CFP

Taille	Densité	Unité	x5	x10	x20	x50	x100	Page
Taille unique	SOUPLE	39 €	35 €	30 €	28 €	25 €	23 €	22
Taille unique	MÉDIUM	39 €	35 €	30 €	28 €	25 €	23 €	22
Taille unique	RIGIDE	39 €	35 €	30 €	28 €	25 €	23 €	22

GOUTTIÈRE CARRÉE

Taille	Densité	Unité	x5	x10	x20	x50	x100	Page
N°1	MÉDIUM	39 €	35 €	30 €	28 €	25 €	23 €	23
N°2	MÉDIUM	39 €	35 €	30 €	28 €	25 €	23 €	23
N°3	MÉDIUM	39 €	35 €	30 €	28 €	25 €	23 €	23
N°4	MÉDIUM	39 €	35 €	30 €	28 €	25 €	23 €	23
N°5	MÉDIUM	39 €	35 €	30 €	28 €	25 €	23 €	23
N°6	MÉDIUM	39 €	35 €	30 €	28 €	25 €	23 €	23
N°7	MÉDIUM	39 €	35 €	30 €	28 €	25 €	23 €	23
N°8	MÉDIUM	39 €	35 €	30 €	28 €	25 €	23 €	23
N°9	MÉDIUM	39 €	35 €	30 €	28 €	25 €	23 €	23
N°10	MÉDIUM	39 €	35 €	30 €	28 €	25 €	23 €	23

CLASSE III

Taille	Densité	Unité	x5	x10	x20	x50	x100	Page
S	SOUPLE	39 €	35 €	30 €	28 €	25 €	23 €	24-25
S	MÉDIUM	39 €	35 €	30 €	28 €	25 €	23 €	24-25
M	SOUPLE	39 €	35 €	30 €	28 €	25 €	23 €	24-25
M	MÉDIUM	39 €	35 €	30 €	28 €	25 €	23 €	24-25
M	SOUPLE MÉDIUM	46 €	42 €	39 €	35 €	33 €	31 €	24-25
M	MÉDIUM RIGIDE	46 €	42 €	39 €	35 €	33 €	31 €	24-25
L	SOUPLE	39 €	35 €	30 €	28 €	25 €	23 €	24-25
L	MÉDIUM	39 €	35 €	30 €	28 €	25 €	23 €	24-25

DISPOSITIFS AUXILIAIRES AUX TRAITEMENTS

GOUTTIÈRE ALIGNEUR

Taille	Densité	Unité	x5	x10	x20	x50	x100	Page
M	MÉDIUM	39 €	35 €	30 €	28 €	25 €	23 €	28

GOUTTIÈRE BAGUES

Taille	Densité	Unité	x5	x10	x20	x50	x100	Page
M	MÉDIUM	39 €	35 €	30 €	28 €	25 €	23 €	29
M	MÉDIUM	AVEC MASSES	39 €	35 €	30 €	28 €	25 €	29
M	MÉDIUM	UNI-MAXILLAIRE	39 €	35 €	30 €	28 €	25 €	29

DISPOSITIFS DE CONTENTION

PROCCLUSEUR

Taille		Unité	x5	x10	x20	x50	x100	Page
N°1		39 €	35 €	30 €	28 €	25 €	23 €	32
N°2		39 €	35 €	30 €	28 €	25 €	23 €	32
N°3		39 €	35 €	30 €	28 €	25 €	23 €	32
N°4		39 €	35 €	30 €	28 €	25 €	23 €	32
N°5		39 €	35 €	30 €	28 €	25 €	23 €	32
N°6		39 €	35 €	30 €	28 €	25 €	23 €	32
N°7		39 €	35 €	30 €	28 €	25 €	23 €	32
N°8		39 €	35 €	30 €	28 €	25 €	23 €	32
N°1	MODULABLE	46 €	42 €	39 €	35 €	33 €	31 €	33
N°2	MODULABLE	46 €	42 €	39 €	35 €	33 €	31 €	33
N°3	MODULABLE	46 €	42 €	39 €	35 €	33 €	31 €	33
N°4	MODULABLE	46 €	42 €	39 €	35 €	33 €	31 €	33
N°5	MODULABLE	46 €	42 €	39 €	35 €	33 €	31 €	33
N°6	MODULABLE	46 €	42 €	39 €	35 €	33 €	31 €	33
N°7	MODULABLE	46 €	42 €	39 €	35 €	33 €	31 €	33
N°8	MODULABLE	46 €	42 €	39 €	35 €	33 €	31 €	33

Tailles et densités

Une prescription adaptée à chaque patient

Les dispositifs Innova Pharm sont proposés en plusieurs tailles et densités afin d'adapter le choix du dispositif aux besoins fonctionnels, au confort et à la tolérance du patient.

Choisir la bonne taille : La taille doit permettre un positionnement stable et confortable, une action fonctionnelle efficace et une bonne compliance du patient.

PREMIÈRE INTENTION & EXERCICE

3-6
ans

6 ans
et +

XL

Adolescents
et adultes



INTERCEPTION

S

3-6 ans

M

6 ans et +

L

Prise en charge
secondes molaires

XL

Adolescents
et adultes



GOUTTIÈRE CARRÉE

La taille est déterminée à partir de la somme des diamètres mésio-distaux des 4 incisives supérieures, à l'aide d'un tableau de concordance⁽¹⁾.



Découvrez la
méthode pas à
pas en scannant
ce QR code.



PROCCLUSEUR⁽²⁾

Apprenez à utiliser la règlette de mesure⁽³⁾ et à sélectionner la taille la plus adaptée à votre patient.



Scannez le
QR code.



⁽¹⁾ Tableau de concordance disponible page 23. Également disponible sur demande pour l'achat d'une Gouttière Carrée. ⁽²⁾ Plus d'information sur les Proccluseurs et Proccluseurs modulables en pages 32-33. ⁽³⁾ Règlette disponible sur demande pour l'achat du Proccluseur ou du Proccluseur modulable.

Pour en savoir plus sur **le choix des tailles**, consultez notre vidéo explicative en scannant ce QR code.



Comprendre les densités

Les densités correspondent à différents niveaux de dureté du matériau. Elles permettent d'ajuster le confort, le contrôle musculaire, l'action thérapeutique et la stabilité fonctionnelle.

DENSITÉ SOUPLE

Confort & acceptation

Jeunes patients, hypersensibilité, conseillée pour la taille S

DENSITÉ MÉDIUM

Polyvalence thérapeutique

Majorité des traitements, conseillée à partir de la taille M

DENSITÉ RIGIDE

Contrôle renforcé

Forte tonicité, besoin de contrôle accru

Les bi-densités Innova Pharm

Une technologie brevetée associant deux niveaux de densité dans un même dispositif : souplesse au contact des tissus mous et rigidité pour le contrôle des arcades, **sans augmentation d'épaisseur.**



Conseils de prescription

CONFORT PRIORITAIRE

DENSITÉ SOUPLE

USAGE POLYVALENT

DENSITÉ MÉDIUM

CONTRÔLE RENFORCÉ

DENSITÉ RIGIDE

CONFORT + EFFICACITÉ

BI-DENSITÉ SOUPLE MÉDIUM

CONTRÔLE + STABILITÉ

BI-DENSITÉ MÉDIUM RIGIDE



La prescription du dispositif, de sa taille et de sa densité doit être réalisée par un professionnel de santé qualifié. Plus d'informations sur les tailles et densités dans les pages produits dédiées.

Pour en savoir plus sur **le choix de nos densités**, consultez notre vidéo explicative en scannant ce QR code.



Dispositifs de première intention et d'exercice

Rééducation de la **ventilation** et de la **déglutition**

Ces dispositifs oro-myofonctionnels constituent une première étape thérapeutique dans la prise en charge des dysfonctions oro-faciales chez l'enfant.




ÉCRAN

Rééducation de la ventilation

Conçu pour la rééducation de la ventilation, l'Écran permet à l'enfant d'acquérir une respiration exclusivement nasale afin de développer harmonieusement son maxillaire et sa mandibule.

Pour l'acquisition d'une ventilation nasale

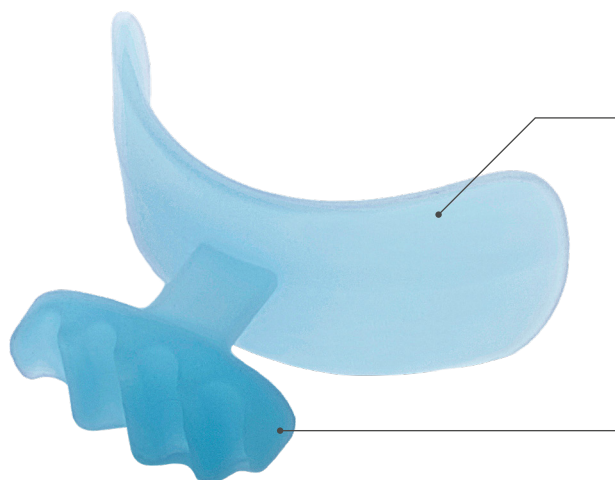

Le bouclier vestibulaire

Empêche le contact lèvres-langue à l'origine des béances antérieures ou latérales. Il se place entre les lèvres et les dents.

Le bouton de préhension

Facilite la mise en bouche et assure une manipulation hygiénique du dispositif.

L'Écran se positionne entre les lèvres et les dents et exerce une pression sur les incisives supérieures lorsqu'il existe un décalage antéropostérieur entre les dents, et diminue la contraction des joues à l'origine des palais étroits.

C'est un **substitut de la succion des doigts et de la tétine**. Il peut faire disparaître cette habitude nocive et rétablir un environnement fonctionnel favorable à la croissance harmonieuse des mâchoires et des dents.



Disponible en :

3-6 ans


6 ans et +

DENSITÉ RIGIDE

Conseillé pour les patients ayant une forte tonicité labiale et jugale.

Disponible en :

6 ans et +

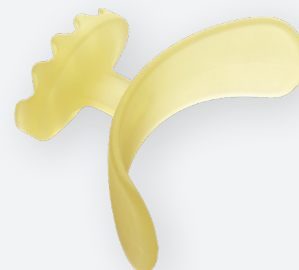

i LE DISPOSITIF DOIT ÊTRE PORTÉ ENVIRON **2 HEURES PAR JOUR ET TOUTE LA NUIT**.

ÉCRAN

AVEC BUTÉE

Rééducation de la ventilation

Conseillé dans les cas de décalages dentaires, lorsque la mâchoire inférieure est en retrait.



La butée

Entraîne une propulsion mandibulaire et oriente la langue vers les papilles palatines pour une déglutition secondaire. La butée se positionne derrière les incisives mandibulaires.

Disponible en :

3-6
ans

6 ans
et +



Le port diurne prépare progressivement le patient au port nocturne, facilitant son acceptation et limitant les rejets pendant la nuit.



UNE **RÉÉDUCATION FONCTIONNELLE** ASSOCIÉE AU TRAITEMENT ORTHODONTIQUE PEUT ACCOMPAGNER L'ÉVOLUTION CLINIQUE.

OBSERVATION CLINIQUE

Acquisition d'une ventilation nasale

Cas clinique montrant l'évolution progressive d'une béeance antérieure dans un contexte de rééducation oro-myofonctionnelle avec l'Écran.



AVRIL 1998



JANVIER 2000

 La prescription et le suivi doivent être réalisés par un professionnel de santé qualifié.



Ne convient pas aux enfants de moins de 36 mois. Occlusions de Classe III ou tendances prognathiques. Respirateurs buccaux exclusifs.


DÉGLUTIX

| Rééducation de la déglutition

Conçu pour la rééducation de la déglutition primaire par action réflexe, le Déglutix favorise une déglutition correcte et naturelle, sans effort conscient.



Pour l'acquisition d'une déglutition secondaire

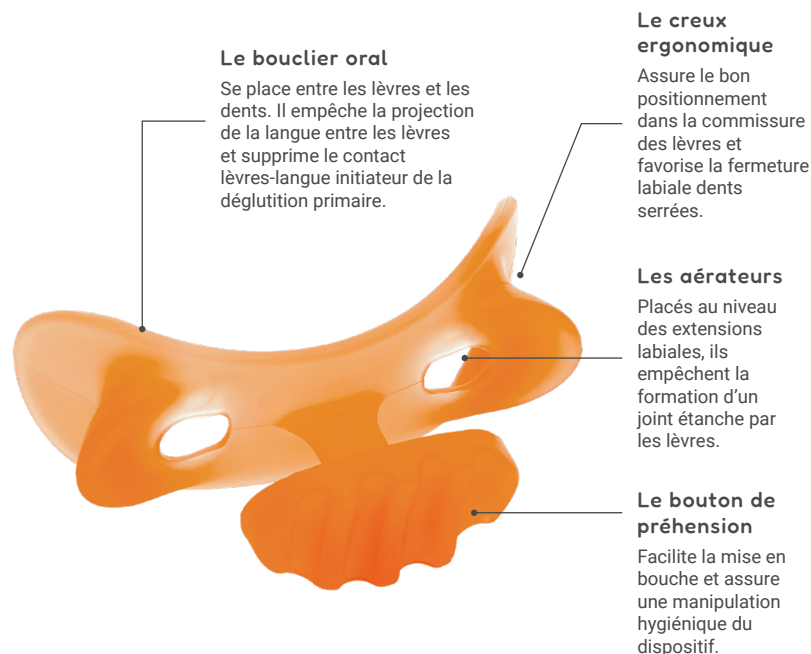

Le Déglutix se positionne entre les lèvres et les dents. Afin de déglutir, le patient doit serrer les dents et placer sa langue contre son palais pour réaliser une déglutition secondaire correcte, facilitée par les aérateurs. Cette nouvelle déglutition se fait sans action consciente afin que l'apprentissage s'effectue spontanément.

i LE DISPOSITIF DOIT ÊTRE PORTÉ ENVIRON **30 MINUTES PAR JOUR**.

Disponible en :

3-6 ans

6 ans et +

XL

Coloris disponibles par taille :

Bleu

Orange

Rose



DÉGLUTIX

À PISTES

Rééducation de la déglutition

Conseillé
dans les cas
d'instabilités
occlusales.

Disponible en :



6 ans
et +

Coloris disponibles :

Bleu

Orange

Rose

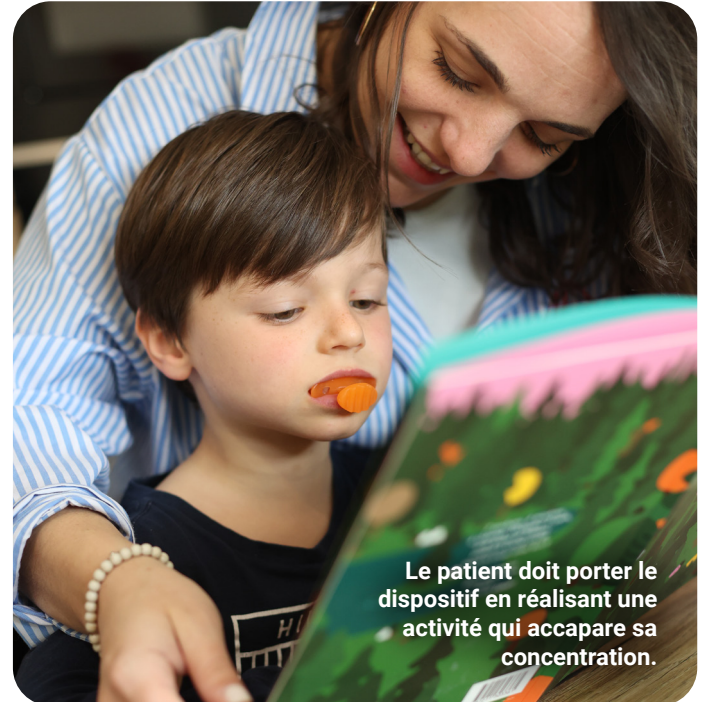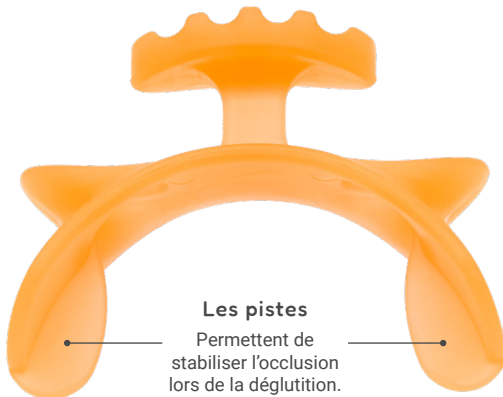

UNE **RÉÉDUCATION FONCTIONNELLE** ASSOCIÉE AU TRAITEMENT ORTHODONTIQUE
PEUT ACCOMPAGNER L'ÉVOLUTION CLINIQUE.

OBSERVATION CLINIQUE

Résultat en moins de 3 mois

Chez un patient en traitement multi-attaches, le port du Déglutix en complément de la prise en charge a permis une amélioration fonctionnelle associée à une évolution de la béance.



DÉCEMBRE 2016



FÉVRIER 2017

 La prescription et le suivi doivent être réalisés
par un professionnel de santé qualifié.



Ne convient pas aux enfants de moins de 36 mois.

Dispositifs d'interception

Correction des dysfonctions oro-myofonctionnelles


Ces dispositifs interviennent en seconde intention.
Ils permettent de corriger les déséquilibres fonctionnels
et occlusaux tout en accompagnant le développement
harmonieux des arcades dentaires et des bases osseuses.



Nos dispositifs d'interception agissent simultanément sur la ventilation, la posture linguale, l'occlusion et l'équilibre musculaire, pour une prise en charge fonctionnelle globale.

Le bouclier vestibulaire
corrige la ventilation buccale.

Les extensions « lip bumper »
neutralisent les contractions labio-mentonnières, diminuent les pressions musculaires et favorisent la croissance mandibulaire.

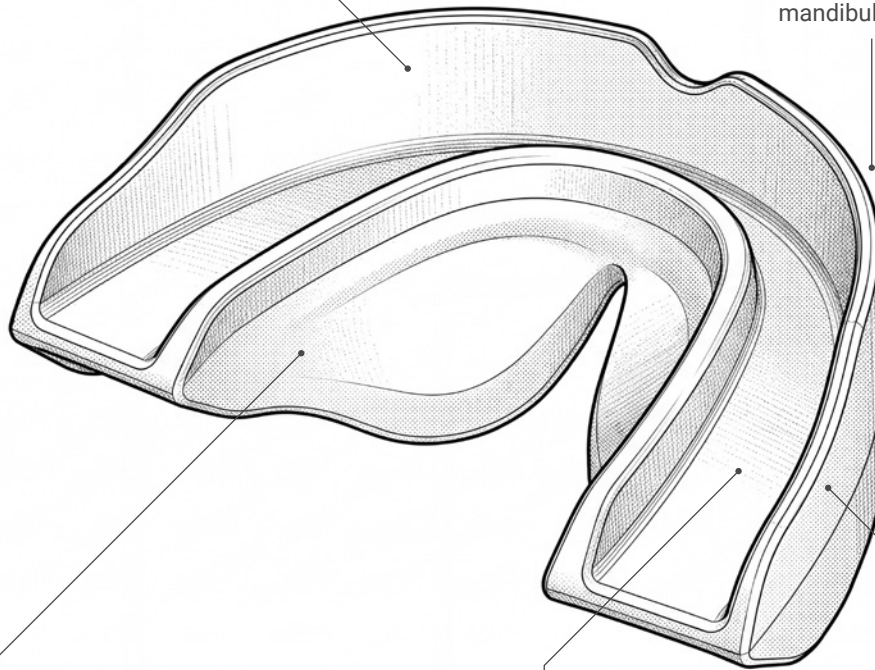

Les masses bilatérales brevetées Innova Pharm agissent comme un ascenseur lingual. Elles positionnent la langue au palais et favorisent la déglutition secondaire.

La forme en U de l'arcade mandibulaire est circonscrite dans le périmètre de l'arcade maxillaire pour favoriser l'engrènement des secteurs latéraux.

Le plan d'occlusion guide la relation inter-arcades et participe à la correction occlusale.

Nos densités

Afin d'adapter au mieux chaque dispositif aux besoins fonctionnels et au confort du patient, nous proposons plusieurs niveaux de densité, **sans augmentation d'épaisseur** :

DENSITÉ SOUPLE

DENSITÉ MÉDIUM

DENSITÉ RIGIDE

Chaque densité répond à une indication spécifique, permettant d'ajuster progressivement l'action thérapeutique tout en favorisant la compliance du patient.

Contrairement aux approches classiques où la rigidité est obtenue par ajout de matière, nos dispositifs conservent **une finesse constante**, pour un meilleur confort et une adaptation optimale en bouche.

BI-DENSITÉ : UNE EXCLUSIVITÉ INNOVA PHARM

Disponible en :

BI-DENSITÉ SOUPLE MÉDIUM

BI-DENSITÉ MÉDIUM RIGIDE

Confort et efficacité réunis

Premières gouttières associant deux densités au sein d'un même dispositif, grâce à un procédé de fabrication innovant et breveté.

Permet de combiner :

- **Souplesse** au contact des tissus mous (lèvres, joues)
- **Rigidité** au niveau des arcades dentaires

Pour un meilleur confort patient et une efficacité thérapeutique optimisée.

Une
conception
pensée pour
la pratique
clinique

POUR LE PRATICIEN

Une adaptation précise à chaque indication

Une progression maîtrisée du traitement

Des résultats optimisés

POUR LE PATIENT

Un meilleur confort au quotidien

Une meilleure compliance

Une acceptation facilitée

CLASSE I

Maintien et équilibre en Classe I

Lorsque l'occlusion est en Classe I, cette gouttière permet de corriger les dysfonctions linguales et labiales.



Bouclier vestibulaire



Masses bilatérales brevetées



Extensions lip bumper



Plan d'occlusion



Forme d'arcade en U



Spécificité

La mandibule reste positionnée en Classe I.

Rééducation oro-myofonctionnelle et occlusale.

Actions principales

- Correction des dysfonctions linguales et labiales
- Amélioration de la ventilation nasale
- Rééducation de la déglutition
- Stabilisation de l'équilibre occlusal
- Soulagement des articulations temporo-mandibulaires (ATM)

Conseils d'utilisation

Les masses bilatérales se positionnent vers le bas sous la langue. La langue se place naturellement en position haute.

i LE DISPOSITIF DOIT ÊTRE PORTÉ ENVIRON 2 HEURES PAR JOUR ET TOUTE LA NUIT.

Maintien et équilibre en Classe I



Disponible en :

4 tailles - 5 densités

	S	M	L	XL
DENSITÉ SOUPLE	✓	✓	✓	✓
DENSITÉ MÉDIUM	✓	✓	✓	✓
DENSITÉ RIGIDE	✓	✓	✓	
BI-DENSITÉ SOUPLE MÉDIUM		✓		
BI-DENSITÉ MÉDIUM RIGIDE		✓		

OBSERVATION CLINIQUE

Chez des jumeaux de 8 ans, à âge et environnement comparables, une différence de fonction respiratoire peut entraîner des répercussions visibles sur l'équilibre oro-facial et le développement des arcades.



Jumeau A



Jumeau B

Se former à la
thérapeutique
fonctionnelle*

Découvrez nos formations dédiées à la prise en charge des dysfonctions oro-faciales.



Scannez ce QR code pour vous inscrire à nos formations

* Plus d'information sur nos formations en page 35.

CLASSE II

| Correction des décalages de Classe II

Lorsque l'occlusion est en Classe II, cette gouttière permet de corriger les dysfonctions linguales et labiales tout en favorisant la propulsion mandibulaire.



Bouclier vestibulaire



Masses bilatérales brevetées



Extensions lip bumper



Plan d'occlusion



Forme d'arcade en U



Spécificité

La mandibule est positionnée en relation de bout à bout pour favoriser l'engrènement des secteurs latéraux.

Correction des décalages antéro-postérieurs.

Actions principales

- Correction des dysfonctions linguales et labiales
- Amélioration de la ventilation nasale
- Rééducation de la déglutition
- Stabilisation de l'équilibre occlusal
- Soulagement des articulations temporo-mandibulaires (ATM)

Conseils d'utilisation

Les masses bilatérales se positionnent vers le bas sous la langue. La langue se place naturellement en position haute.

i LE DISPOSITIF DOIT ÊTRE PORTÉ ENVIRON 2 HEURES PAR JOUR ET TOUTE LA NUIT.

Correction des décalages de Classe II



Disponible en :

4 tailles - 5 densités

	S	M	L	XL
DENSITÉ SOUPLE	✓	✓	✓	✓
DENSITÉ MÉDIUM	✓	✓	✓	✓
DENSITÉ RIGIDE	✓	✓	✓	
BI-DENSITÉ SOUPLE MÉDIUM	✓	✓	✓	
BI-DENSITÉ MÉDIUM RIGIDE	✓	✓	✓	

OBSERVATION CLINIQUE

Chez un patient présentant une Classe II, l'utilisation de la gouttière a permis une amélioration fonctionnelle et une correction progressive du décalage maxillo-mandibulaire.



FÉVRIER 2022



OCTOBRE 2022

Se former à la
thérapeutique
fonctionnelle*

Découvrez nos formations dédiées à la prise en charge des dysfonctions oro-faciales.



Scannez ce QR code pour vous inscrire à nos formations

* Plus d'information sur nos formations en page 35.

GOUTTIÈRE CFP

| Correction des décalages de Classe II

Une solution simple et immédiate pour la prise en charge des dysfonctions en Classe II.



Bouclier vestibulaire



Masses bilatérales brevetées



Plan d'occlusion



Forme d'arcade en U



Disponible en taille unique et en 3 densités* :

Taille unique

DENSITÉ SOUPLE

DENSITÉ MÉDIUM

DENSITÉ RIGIDE

Spécificité

La mandibule est positionnée en relation de bout à bout.

Première gouttière de Classe II conçue par Innova Pharm, la CFP est une taille intermédiaire entre la S et la M*.

Actions principales

- Correction des dysfonctions linguales et labiales
- Amélioration de la ventilation nasale
- Rééducation de la déglutition
- Stabilisation de l'équilibre occlusal
- Soulagement des articulations temporo-mandibulaires (ATM)

Conseils d'utilisation

Les masses bilatérales se positionnent vers le bas sous la langue. La langue se place naturellement en position haute.

i LE DISPOSITIF DOIT ÊTRE PORTÉ ENVIRON 2 HEURES PAR JOUR ET TOUTE LA NUIT.

i La prescription et le suivi doivent être réalisés par un professionnel de santé qualifié.



Ne convient pas aux enfants de moins de 36 mois et en cas d'apnée du sommeil.

* La Gouttière CFP repose sur une formulation spécifique, différente de celle des autres dispositifs Innova Pharm, tout en conservant des indications et des modalités d'utilisation comparables.

GOUTTIÈRE CARRÉE

Pistes PLANAS
Correction des décalages
de Classe II

Conçue selon la charte de KORKHAUS en sortie de pistes de PLANAS.



- Bouclier vestibulaire ✓
- Masses bilatérales brevetées ✓
- Plan d'occlusion ✓
- Forme d'arcade carrée ✓
- Extensions lip bumper ✓



Comment prendre la mesure ?

La taille se mesure à l'aide du tableau de concordance ci-dessous, correspondant à la charte de KORKHAUS. En cas de mesure entre 2 tailles, choisir la taille supérieure.



Consultez la vidéo explicative pas à pas en scannant ce QR code.

Taille de la gouttière	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Somme des diamètres mésiodistaux des 4 incisives supérieures (SI)	25	26.2	27.5	28.7	30	31.2	32.5	33.7	35	36.2

Spécificité

Sa forme d'arcade maxillaire carrée conçue selon la charte de KORKHAUS favorise l'occlusion latérale. Le plan de propulsion libère la mandibule et favorise l'établissement de la déglutition secondaire. La mandibule est positionnée en relation de bout à bout.

Actions principales

- Correction des dysfonctions linguales et labiales
- Amélioration de la ventilation nasale
- Rééducation de la déglutition
- Stabilisation de l'équilibre occlusal latéral
- Soulagement des articulations temporo-mandibulaires (ATM)
- Mise en place et suivi des pistes PLANAS

Conseils d'utilisation

La gouttière se positionne en bouche en respectant l'arcade maxillaire. La taille se détermine à l'aide d'un tableau de concordance* basé sur la charte de KORKHAUS. Le port est défini par le praticien en fonction du protocole thérapeutique.

i LE DISPOSITIF DOIT ÊTRE PORTÉ ENVIRON 2 HEURES PAR JOUR ET TOUTE LA NUIT.

i La prescription et le suivi doivent être réalisés par un professionnel de santé qualifié.



Ne convient pas aux enfants de moins de 36 mois et en cas d'apnée du sommeil.

* Tableau de concordance disponible sur demande pour l'achat de la Gouttière carrée.

CLASSE III

Correction des décalages de Classe III
Articulés incisifs croisés

En présence d'une Classe III non squelettique ou d'un articulé inversé antérieur, cette gouttière permet de corriger les dysfonctions oro-faciales tout en améliorant les rapports incisifs.



Bouclier vestibulaire



Masses bilatérales brevetées



Extensions lip bumper



Plan d'occlusion



Forme d'arcade en U



Spécificité

Le surplomb incisif est augmenté pour la correction des articulés incisifs croisés.

La gouttière permet la correction des décalages de Classe III d'origine fonctionnelle.

Actions principales

- Correction des dysfonctions linguales et labiales
- Amélioration de la ventilation nasale
- Rééducation de la déglutition
- Stabilisation de l'équilibre occlusal
- Soulagement des articulations temporo-mandibulaires (ATM)
- Correction du surplomb incisif négatif

Conseils d'utilisation

Les masses bilatérales se positionnent vers le bas sous la langue. La langue se place naturellement en position haute.

i LE DISPOSITIF DOIT ÊTRE
PORTÉ ENVIRON **2 HEURES**
PAR JOUR ET TOUTE LA NUIT.

Corrige l'inversion d'articulé antérieur



Disponible en :

3 tailles - 4 densités

	S	M	L
DENSITÉ SOUPLE	✓	✓	✓
DENSITÉ MÉDIUM	✓	✓	✓
BI-DENSITÉ SOUPLE MÉDIUM		✓	
BI-DENSITÉ MÉDIUM RIGIDE		✓	

OBSERVATION CLINIQUE

Chez un patient présentant un articulé inversé, le port de la gouttière Classe III permet une correction progressive du surplomb incisif et une amélioration des rapports occlusaux.



Décembre 2014



Juillet 2015

Se former à la thérapeutique fonctionnelle*

Découvrez nos formations dédiées à la prise en charge des dysfonctions oro-faciales.



Scannez ce QR code pour vous inscrire à nos formations

* Plus d'information sur nos formations en page 35.

Dispositifs auxiliaires aux traitements

Accompagnement
oro-myofonctionnel des traitements
multi-attaches et **aligneurs**.

Ces dispositifs complètent les traitements afin d'optimiser leur efficacité et de rééduquer les fonctions oro-faciales.



GOUTTIÈRE ALIGNEUR

Dispositif auxiliaire aux traitements par aligneur

Conçue pour intégrer la rééducation oro-myofonctionnelle au cours des traitements orthodontiques par aligneur.



6+

2H



Disponible en :

M

DENSITÉ MÉDIUM

Bouclier vestibulaire



Masses bilatérales brevetées



Plan d'occlusion



Forme d'arcade en U



Spécificité

Bouclier vestibulaire réduit pour un confort optimal sous aligneur et languette maxillaire médiane pour une stabilité renforcée du dispositif. Largeur palato-vestibulaire augmentée pour tenir compte de l'épaisseur de l'aligneur.

La mandibule est positionnée en relation de bout à bout.

Actions principales

- Correction des dysfonctions linguales et labiales
- Amélioration de la ventilation nasale
- Rééducation de la déglutition
- Stabilisation de l'équilibre occlusal

Conseils d'utilisation

Les masses bilatérales se positionnent vers le bas sous la langue. La langue se place naturellement en position haute.

i LE DISPOSITIF DOIT ÊTRE PORTÉ ENVIRON **2 HEURES PAR JOUR ET TOUTE LA NUIT, SUR L'ALIGNEUR.**

i La prescription et le suivi doivent être réalisés par un professionnel de santé qualifié.



Ne convient pas aux enfants de moins de 6 ans et en cas d'apnée du sommeil.

GOUTTIÈRE BAGUES

Dispositif auxiliaire aux traitements multi-attaches

Conçue pour intégrer la rééducation oro-myofonctionnelle au cours des traitements orthodontiques multi-bagues.



Disponible en :

M

DENSITÉ MÉDIUM

et


M

DENSITÉ MÉDIUM

AVEC MASSES



GOUTTIÈRE BAGUES

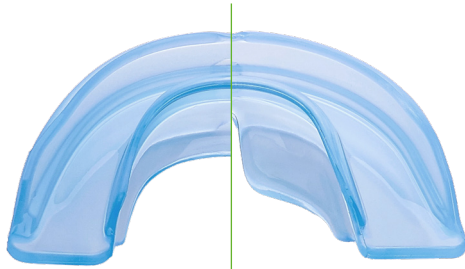

GOUTTIÈRE BAGUES

AVEC MASSES

Existe aussi en :

M

DENSITÉ MÉDIUM

UNI-MAXILLAIRE

Conseillée pour la rééducation linguale lorsque seule l'arcade maxillaire est baguée.



Spécificité

Possède une gorge maxillaire et mandibulaire pour les brackets vestibulaires.

Elle favorise le travail des tractions intermaxillaires en plaçant les arcades en bout à bout.

Actions principales

- Correction des dysfonctions linguales et labiales
- Amélioration de la ventilation nasale
- Rééducation de la déglutition
- Stabilisation de l'équilibre occlusal
- Soulagement des articulations temporo-mandibulaires (ATM)
- Protection des tissus mous

Conseils d'utilisation

Les masses bilatérales se positionnent vers le bas sous la langue. La langue se place naturellement en position haute.

i LE DISPOSITIF DOIT ÊTRE PORTÉ ENVIRON **2 HEURES PAR JOUR ET TOUTE LA NUIT.**



La prescription et le suivi doivent être réalisés par un professionnel de santé qualifié.



Ne convient pas aux enfants de moins de 6 ans.
Occlusions de Classe III ou tendances prognathiques. Respirateurs buccaux exclusifs.

Dispositifs de contention

Maintien des résultats - Interception

Ces dispositifs interviennent en phase de stabilisation après traitement. Ils permettent de maintenir les corrections obtenues, de prévenir les récives et de pérenniser l'équilibre fonctionnel et occlusal ou en phase d'interception après une première étape de traitement.



PROCCLUSEUR

Stabiliser les résultats

Une solution de contention permettant de stabiliser les résultats obtenus après une phase d'interception ou de traitement orthodontique.



Comment prendre la mesure ?

La taille se mesure à l'aide de la réglette dédiée. Mesurer au maxillaire : des faces distales de 22 à 12 au $\frac{1}{3}$ inférieur des faces vestibulaires. En cas de mesure entre 2 tailles, choisir la taille supérieure.



Apprenez à utiliser la réglette de mesure et à sélectionner la taille la plus adaptée à votre patient.

Scannez le QR code.

Spécificité

Indentation de 14 à 24 et 34 à 44. Les pistes postérieures libèrent l'occlusion molaire pour une mise en fonction physiologique.

Éruption des secteurs latéraux grâce aux pistes de guidage de l'occlusion.

Actions principales

- Stabilisation des résultats post-traitement orthodontique
- Stabilisation après une phase d'interception
- Amélioration de l'engrènement des secteurs latéraux
- Amélioration de la ventilation nasale
- Aide à la correction de certaines supraclusions

Conseils d'utilisation

Le Proccluseur se positionne en bouche à l'aide d'un repère numérique sur le dispositif. Les indentations assurent un positionnement stable, précis et reproductible. La taille se détermine à l'aide d'une réglette dédiée*.

i LE DISPOSITIF DOIT ÊTRE PORTÉ ENVIRON 2 HEURES PAR JOUR ET TOUTE LA NUIT.

i La prescription et le suivi doivent être réalisés par un professionnel de santé qualifié.



Ne convient pas aux enfants de moins de 36 mois, en cas d'occlusion de Classe III ou d'apnée du sommeil.

* Réglette disponible sur demande pour l'achat du Proccluseur.

PROCCLUSEUR

MODULABLE

Dispositif thermoformable permettant l'individualisation



Comment procéder à l'individualisation du proccluseur modulable ?



Suivez les étapes du moulage en bouche pour obtenir une adaptation personnalisée et un confort optimal.

Scannez le QR code.

Spécificité

Permet d'obtenir un dispositif individualisé en tenant compte de la largeur des arcades, de la variabilité des formes et des axes coronaires, sans phase de laboratoire. Meilleure tenue en bouche grâce aux indentations individualisées.

OBSERVATION CLINIQUE

Chez un patient en fin de traitement orthodontique, le Proccluseur permet de stabiliser l'occlusion et de guider progressivement les rapports inter-arcades. Une amélioration du calage postérieur et une meilleure intégration fonctionnelle sont observées, limitant les risques de récidive.



Décembre 2014



Juillet 2015



La prescription et le suivi doivent être réalisés par un professionnel de santé qualifié.



Ne convient pas aux enfants de moins de 36 mois, en cas d'occlusion de Classe III ou d'apnée du sommeil.

* Réglette disponible sur demande pour l'achat du Proccluseur modulable.

Vous accompagner au-delà des dispositifs.

Formations, vidéos pratiques, conseils de prescription, support clinique et accompagnement personnalisé : Innova Pharm met à votre disposition un ensemble de ressources pour faciliter votre pratique au quotidien et accompagner la réussite de vos traitements.





Des formations disponibles tout au long de l'année.

Qui peut participer ?

Professionnels de santé : ODF, omnipraticiens, assistant(e)s, orthophonistes, kinésithérapeutes, ostéopathes, paramédicaux.

Nos formations sont pluridisciplinaires.



Retrouvez les formations Innova Pharm à venir en scannant le QR code ou sur www.innovapharm.fr

À partir de
230 € par personne*
(déjeuner et pauses compris)

Une question ?
Nous vous
accompagnons

02 41 58 78 37

mail@innovapharm.fr

www.innovapharm.fr





- ✓ Prix dégressifs & panachages possibles toute l'année⁽¹⁾
- ✓ 1 dispositif OFFERT par dizaine commandée⁽²⁾
- ✓ Frais de port offerts⁽³⁾ dès 10 dispositifs commandés

Pour tout renseignement,
nous vous accompagnons :
mail@innovapharm.fr

 **02 41 58 78 37**



Innova Pharm
5 bd Pierre Lecoq • BP 30451
49304 CHOLET cedex • France

Innova Pharm 
L'EXPERTISE FONCTIONNELLE DEPUIS 1999 

Retrouvez tous nos
dispositifs sur le site
innovapharm.fr



⁽¹⁾ Les panachages sont possibles entre les dispositifs ayant un prix identique. Voir nos tarifs en pages 4-5. ⁽²⁾ Bénéficiez d'un dispositif offert par dizaine commandée. ⁽³⁾ Frais de port offerts en France métropolitaine à partir de 10 dispositifs commandés. Offre valable uniquement sur les dispositifs. Offre non cumulable.

