

GOUTTIÈRES CLASSE II

ENFANTS À
PARTIR DE
5 ANS ET
ADULTES

Appareil d'interception
pour Classe II

**VENTILATION • DYSFONCTIONS LINGUALES
ET LABIALES**

- **Chez l'enfant** : en denture mixte, correction des troubles fonctionnels et occlusaux dans un cadre préorthodontique.
- **Chez l'adulte** : aide au soulagement des articulations temporo-mandibulaires.



ÉVOLUTION D'UN CAS SUR 6 MOIS

AVEC LE PORT DE LA GOUTTIÈRE CLASSE II




Juillet 2014



Janvier 2015

**Les gouttières Classe II sont fabriquées
et conditionnées en France**

 Laboratoires INNOVA PHARM
BP 30451 • 49304 CHOLET Cedex • FRANCE



ACTIONS DU DISPOSITIF MÉDICAL

- Le plan de propulsion libère la croissance mandibulaire et favorise l'établissement de la **déglutition secondaire** (dents en contact, la langue contre le palais et sans mouvement des muscles de la face).
- L'éruption correcte des dents est favorisée dans un cadre préorthodontique.
- Les **masses bilatérales** favorisent la rééducation linguale. La langue est placée en **position haute**.
- Le bouclier vestibulaire corrige la ventilation orale en **ventilation nasale**.
- Les extensions "lip bumper" neutralisent les contractions musculaires de la zone labio-mentonnaire et favorisent la **croissance mandibulaire**.
- La forme de l'arcade mandibulaire est circonscrite dans le périmètre de l'arcade maxillaire pour favoriser l'**engrènement des secteurs latéraux**.
- La mandibule est positionnée en relation de bout à bout pour la **correction d'une Classe II dentaire**.

MODE D'UTILISATION

- La **gouttière Classe II** se place en bouche, **les masses bilatérales vers le bas sous la langue**. La langue se place alors naturellement en haut.
- Lorsque la gouttière est en bouche, la respiration **devient nasale**.
- La gouttière doit être portée de façon très régulière **2 heures par jour et toute la nuit**.
- **La gouttière se nettoie à l'eau froide** avec une brosse à dents et une solution nettoyante, avant et après chaque utilisation. Il faut bien rincer, sécher et ranger l'appareil dans sa boîte, toujours propre. Il est recommandé de le placer 1 fois par semaine dans un bain de bouche ou tout autre solution prescrite par le praticien.

Ne jamais faire bouillir la gouttière.

- Les premiers temps la gouttière peut être perdue durant la nuit, c'est normal : **IL FAUT PERSÉVÉRER**.

SUIVRE SCRUPULEUSEMENT LES INDICATIONS DE VOTRE PRATICIEN.

Tout appareil défectueux doit être remplacé.



COMPOSITION INITIALE

- Matière de grade médical
- Colorant de grade alimentaire
- Sans phtalates, sans bisphénol, sans perturbateurs endocriniens

Dispositif médical de Classe I



CONTRE-INDICATIONS

- Ne convient pas aux enfants de moins de 36 mois



Découvrez l'espace patient sur

www.innovapharm.fr

avec les fiches conseils !

