


# GOUTTIÈRES BAGUES

ENFANTS À  
PARTIR DE  
**10 ANS**

Appareils auxiliaires  
au traitement multibagues

**VENTILATION • DYSFONCTIONS LINGUALES  
ET LABIALES**

- Les gouttières bagues sont des **appareils fonctionnels** pour les patients ayant un traitement multibagues.
- Elles possèdent une gorge maxillaire et mandibulaire pour les brackets vestibulaires.

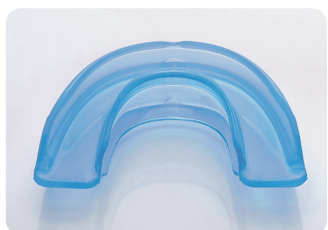

**Les gouttières bagues sont fabriquées  
et conditionnées en France**

 Laboratoires INNOVA PHARM  
BP 30451 • 49304 CHOLET Cedex • FRANCE

CE



## ACTIONS DU DISPOSITIF MÉDICAL

- La **gouttière bagues favorise le travail des tractions intermaxillaires** en plaçant les arcades dentaires en bout à bout.
- Elle **prévient le bruxisme et les troubles des ATM** par la suppression des forces occlusales latérales.
- Elle favorise l'établissement de la **ventilation nasale**.
- Elle **protège les tissus mous** (lèvres, joues) lors de la période d'adaptation aux multibagues.

## SPÉCIFICITÉS

- Les gouttières bagues **avec masses bilatérales** : la présence de masses bilatérales permet de continuer la rééducation combinée de la déglutition, de la posture linguale durant la phase de traitement multibagues.
- La gouttière bagues **uni-maxillaire** : aide à la rééducation linguale lorsque seule l'arcade maxillaire est baguée.

## MODE D'UTILISATION

- La **gouttière bagues** se place en bouche, **les masses bilatérales vers le bas sous la langue**. La langue se place alors naturellement en haut.
- Lorsque la gouttière est en bouche, la respiration **devient nasale**.
- La gouttière doit être portée de façon très régulière **2 heures par jour et toute la nuit**.
- La **gouttière se nettoie à l'eau froide** avec une brosse à dents et une solution nettoyante, avant et après chaque utilisation. Il faut bien rincer, sécher et ranger l'appareil dans sa boîte, toujours propre. Il est recommandé de le placer 1 fois par semaine dans un bain de bouche ou tout autre solution prescrite par le praticien.

### Ne jamais faire bouillir la gouttière.

- Les premiers temps la gouttière peut être perdue durant la nuit, c'est normal : **IL FAUT PERSÉVÉRER**.

### SUIVRE SCRUPULEUSEMENT LES INDICATIONS DE VOTRE PRATICIEN.

Tout appareil défectueux doit être remplacé.

i

#### COMPOSITION INITIALE

- Matière de grade médical
- Colorant de grade alimentaire
- Sans phtalates, sans bisphénol, sans perturbateurs endocriniens

**Dispositif médical de Classe I**

!

#### CONTRE-INDICATIONS

- Ne convient pas aux enfants de moins de 6 ans
- Occlusion de Classe III
- Respirateurs buccaux exclusifs



#### POUR D'AUTRES CONSEILS

**OFFI** vous guide tout au long de l'**espace particulier** du site internet, **fiches conseils**, **fiches pratiques** et **vidéos explicatives** ! N'hésitez pas à vous rendre sur :

[www.innovapharm.fr](http://www.innovapharm.fr)

