

GOUTTIÈRES CFP

ENFANTS À
PARTIR DE
6 ANS

Appareil d'interception
pour Classe II

**VENTILATION • DYSFONCTIONS LINGUALES
ET LABIALES**

- **Chez l'enfant** : Agit dans un cadre préorthodontique chez l'enfant en denture mixte, sur les troubles fonctionnels et occlusaux associés.



ÉVOLUTION D'UN CAS SUR 7 MOIS
AVEC LE PORT DE LA GOUTTIÈRE CFP




Septembre 2010



Avril 2011

**Les gouttières CFP sont fabriquées
et conditionnées en France**

 Laboratoires INNOVA PHARM
BP 30451 • 49304 CHOLET Cedex • FRANCE

CE



ACTIONS DU DISPOSITIF MÉDICAL

- La **gouttière CFP** aide à **corriger la ventilation** par la présence d'un bouclier vestibulaire, elle permet par sa rampe linguale, l'établissement de la **déglutition secondaire**.
- Les **masses bilatérales** favorisent la rééducation linguale. La langue est placée en **position haute**.
- Elle favorise l'**éruption correcte** des dents dans un cadre préorthodontique.
- Elle **positionne la mandibule** en relation de Classe I.

MODE D'UTILISATION

- La **gouttière CFP** se place en bouche, **les masses bilatérales vers le bas sous la langue**. La langue se place alors naturellement en haut.
- Lorsque la gouttière est en bouche, la respiration **devient nasale**.
- La gouttière doit être portée de façon très régulière **2 heures par jour et toute la nuit**.
- La **gouttière se nettoie à l'eau froide** avec une brosse à dents et du dentifrice, avant et après chaque utilisation. Il faut bien rincer, sécher et ranger l'appareil dans sa boîte, toujours propre. Il est recommandé de le placer 1 fois par semaine dans un bain de bouche ou tout autre solution prescrite par le praticien.

Ne jamais faire bouillir la gouttière.

- Les premiers temps la gouttière peut être perdue durant la nuit, c'est normal : **IL FAUT PERSÉVÉRER**.

SUIVRE SCRUPULEUSEMENT LES INDICATIONS DE VOTRE PRATICIEN.

Tout appareil défectueux doit être remplacé.

i

COMPOSITION INITIALE

- Matière de grade médical
- Colorant de grade alimentaire
- Sans phtalates, sans bisphénol, sans perturbateurs endocriniens

Dispositif médical de Classe I



CONTRE-INDICATIONS

- Ne convient pas aux enfants de moins de 36 mois



POUR D'AUTRES CONSEILS

OFFI vous guide tout au long de l'**espace particulier** du site internet, **fiches conseils**, **fiches pratiques** et **vidéos explicatives** ! N'hésitez pas à vous rendre sur :

www.innovapharm.fr

