

# GOUTTIÈRES CLASSE I

ENFANTS À  
PARTIR DE  
**5 ANS** ET  
ADULTES


Appareil d'interception  
pour Classe I

**VENTILATION • DYSFONCTIONS LINGUALES  
ET LABIALES**

- **Chez l'enfant** : correction des troubles fonctionnels et occlusaux dans un cadre préorthodontique.
- **Chez l'adulte** : traitement de la ronchopathie (Ronflement sans apnée). Relâchement musculo-articulaire.



**Les gouttières Classe I sont fabriquées  
et conditionnées en France**

 Laboratoires INNOVA PHARM  
BP 30451 • 49304 CHOLET Cedex • FRANCE

CE



## ACTIONS DU DISPOSITIF MÉDICAL

- La gouttière Classe I favorise la **correction des dysfonctions linguales** telles que la pulsion linguale antérieure (suction de la langue) et la déglutition.
- Les **masses bilatérales** favorisent la rééducation linguale. La langue est placée en **position haute**.
- Le bouclier vestibulaire corrige la ventilation orale en **ventilation nasale**.
- Les extensions "lip bumper" neutralisent les contractions musculaires de la zone labio- mentonnaire et favorisent la **croissance mandibulaire**.
- La forme de l'arcade mandibulaire est circonscrite dans le périmètre de l'arcade maxillaire pour favoriser l'**engrènement des secteurs latéraux**.
- La mandibule reste positionnée en Classe 1.

## MODE D'UTILISATION

- La **gouttière Classe I** se place en bouche, **les masses bilatérales vers le bas sous la langue**. La langue se place alors naturellement en haut.
- Lorsque la gouttière est en bouche, la respiration **devient nasale**.
- La gouttière doit être portée de façon très régulière **2 heures par jour et toute la nuit**.
- **La gouttière se nettoie à l'eau froide** avec une brosse à dents et du dentifrice, avant et après chaque utilisation. Il faut bien rincer, sécher et ranger l'appareil dans sa boîte, toujours propre. Il est recommandé de le placer 1 fois par semaine dans un bain de bouche ou tout autre solution prescrite par le praticien.

### Ne jamais faire bouillir la gouttière.

- Les premiers temps la gouttière peut être perdue durant la nuit, c'est normal : **IL FAUT PERSÉVÉRER**.

**SUIVRE SCRUPULEUSEMENT LES INDICATIONS DE VOTRE PRATICIEN.**  
Tout appareil défectueux doit être remplacé.



### COMPOSITION INITIALE

- Matière de grade médical
- Colorant de grade alimentaire
- Sans phtalates, sans bisphénol, sans perturbateurs endocriniens

**Dispositif médical de Classe I**



### CONTRE-INDICATIONS

- Ne convient pas aux enfants de moins de 36 mois



Découvrez  
l'espace patient sur

[www.innovapharm.fr](http://www.innovapharm.fr)

avec les fiches conseils !

