


DÉGLUTIX


ENFANTS À
PARTIR DE
5 ANS

Appareils d'exercices
de 1^{ère} intention
DÉGLUTITION

- Écran conçu spécifiquement pour la rééducation de la déglutition secondaire par **action reflexe**.

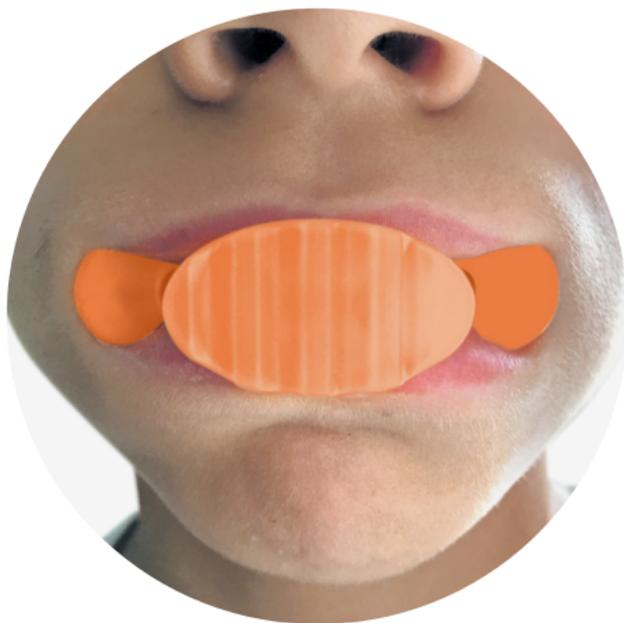

**EXISTE EN
3 COULEURS**

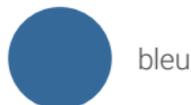

bleu



orange



rose



ÉVOLUTION D'UN CAS À 3 MOIS

AVEC LE PORT DU DÉGLUTIX SUR MULTI-ATTACHES



Décembre 2016



Février 2017

**Les Déglutix sont fabriqués
et conditionnés en France**

 Laboratoires INNOVA PHARM
BP 30451 • 49304 CHOLET Cedex • FRANCE



ACTIONS DU DISPOSITIF MÉDICAL

- La présence du bouclier ne permet pas à la langue de se projeter entre les lèvres, il n'y a plus de contact lèvres-langue initiateur de la déglutition primaire (dysfonctionnelle).
- Les aérateurs placés au niveau des extensions labiales, rendent impossible la réalisation d'un joint étanche par les lèvres.
- Afin de déglutir, il faut serrer les dents et placer la langue contre le palais pour réaliser une **déglutition secondaire correcte**.
- Cette nouvelle déglutition se fait **SANS ACTION CONSCIENTE**.

L'apprentissage s'effectue SPONTANÉMENT.

MODE D'UTILISATION

- **Le Déglutix** se positionne entre les dents et les lèvres (voir photo au recto).
- Le Déglutix **doit être porté 30 minutes par jour**. Pour le port nocturne et les exercices, il faut suivre les indications du praticien.
- Il ne faut pas penser à son appareil, mais **le porter en réalisant une autre activité** qui accapare la concentration : la lecture, la télévision, les devoirs, la tablette ou un jeu vidéo.
- Le Déglutix peut être associé à d'autres appareils : gouttière fonctionnelle, écran orthodontique, appareil amovible ou fixe.
- **Le Déglutix se nettoie à l'eau froide** avec une brosse à dents et du dentifrice, avant et après chaque utilisation. Il faut bien rincer, sécher et ranger l'appareil dans sa boîte, toujours propre. Il est recommandé de le placer 1 fois par semaine dans un bain de bouche ou tout autre solution prescrite par le praticien.

Ne jamais faire bouillir le Déglutix.

SUIVRE SCRUPULEUSEMENT LES INDICATIONS DE VOTRE PRATICIEN.

Tout appareil défectueux doit être remplacé.



COMPOSITION INITIALE

- Matière de grade médical
- Colorant de grade alimentaire
- Sans phtalates, sans bisphénol, sans perturbateurs endocriniens

Dispositif médical de Classe I



CONTRE-INDICATIONS

- Ne convient pas aux enfants de moins de 36 mois



POUR D'AUTRES CONSEILS

OFFI vous guide tout au long de l'**espace particulier** du site internet, **fiches conseils**, **fiches pratiques** et **vidéos explicatives** ! N'hésitez pas à vous rendre sur :

www.innovapharm.fr

