

ÉCRANS ORTHODONTIQUES

ENFANTS À
PARTIR DE
5 ANS

Appareils d'exercices
de 1^{ère} intention

VENTILATION • DÉGLUTITION • BÉANCE

- Écran conçu spécifiquement pour la rééducation de la ventilation.



**ÉVOLUTION D'UN CAS SUR 6 MOIS
AVEC LE PORT DE L'ÉCRAN**




Septembre 2006



Mars 2007

**Les écrans orthodontiques sont fabriqués
et conditionnés en France**

 Laboratoires INNOVA PHARM
BP 30451 • 49304 CHOLET Cedex • FRANCE

CE



ACTIONS DU DISPOSITIF MÉDICAL

- L'écran exerce une pression sur les incisives supérieures lorsqu'il existe un **décalage antéro-postérieur** entre les dents.
- **Il diminue les contractions des joues** à l'origine des palais étroits.
- **La respiration** doit être exclusivement **nasale**. L'écran permet d'acquiescer cette respiration et ainsi de développer harmonieusement le maxillaire et la mandibule.
- **La déglutition** se réalise dents en contact. L'interposition de l'écran entre les lèvres et les dents empêche le contact lèvre-langue à l'origine des béances antérieures (voir photo).
- L'écran est un **substitut de la succion du doigt ou de la sucette**. Il peut faire disparaître cette habitude nocive et rétablir un environnement fonctionnel favorable à la croissance des mâchoires et des dents.
- **L'écran rigide** existe pour les enfants qui ont une **forte tonicité** au niveau des lèvres et des joues.
- L'**écran orthodontique avec butée** (EOB) est conseillé dans les cas de décalages dentaires, lorsque la mâchoire inférieure est en retrait. La butée entraîne une propulsion mandibulaire et oriente la langue vers les papilles palatines pour une déglutition secondaire.

MODE D'UTILISATION

- **L'écran** se positionne entre les dents et les lèvres.
- L'écran doit être porté de façon très régulière **2 heures par jour et toute la nuit**.
- **L'écran se nettoie à l'eau froide** avec une brosse à dents et du dentifrice, avant et après chaque utilisation. Il faut bien rincer, sécher et ranger l'appareil dans sa boîte, toujours propre. Il est recommandé de le placer 1 fois par semaine dans un bain de bouche ou tout autre solution prescrite par le praticien.

Ne jamais faire bouillir l'écran.

- Les premiers temps, l'écran peut être perdu durant la nuit, c'est normal : **IL FAUT PERSÉVÉRER**.

SUIVRE SCRUPULEUSEMENT LES INDICATIONS DE VOTRE PRATICIEN.

Tout appareil défectueux doit être remplacé.



COMPOSITION INITIALE

- Matière de grade médical
- Colorant de grade alimentaire
- Sans phtalates, sans bisphénol, sans perturbateurs endocriniens

Dispositif médical de Classe I



CONTRE-INDICATIONS

- Ne convient pas aux enfants de moins de 36 mois



POUR D'AUTRES CONSEILS

OFFI vous guide tout au long de l'**espace particulier** du site internet, **fiches conseils**, **fiches pratiques** et **vidéos explicatives** ! N'hésitez pas à vous rendre sur :

www.innovapharm.fr

