


GOUTTIÈRES CARRÉES

ENFANTS À
PARTIR DE
5 ANS ET
ADULTES

Appareil d'interception
pour Classe II

**VENTILATION • DYSFONCTIONS LINGUALES
ET LABIALES • RONCHOPATHIE • BRUXISME •
DYSFONCTIONS CRÂNIO-MANDIBULAIRES**

- **Chez l'enfant** : correction des troubles fonctionnels et occlusaux dans un cadre préorthodontique.
- **Chez l'adulte** : traitement de ronchopathie (ronflement sans apnée), bruxisme, relâchement cranio-mandibulaire.

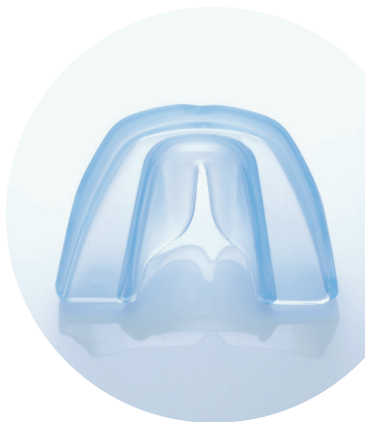

ÉVOLUTION D'UN CAS SUR 12 MOIS
AVEC LE PORT DE LA GOUTTIÈRE CARRÉE




Décembre 2010



Décembre 2011

**Les gouttières carrées sont fabriquées
et conditionnées en France**

 Laboratoires INNOVA PHARM
BP 30451 • 49304 CHOLET Cedex • FRANCE



ACTIONS DU DISPOSITIF MÉDICAL

- **Interception en denture mixte**, en complément ou en sortie des pistes de PLANAS.
- **Le plan de propulsion libère la mandibule** et favorise l'établissement de la déglutition secondaire.
- **Permet des exercices de mastication** bilatérale alternée.
- Les **masses bilatérales** favorisent la rééducation linguale. La langue est placée en **position haute**.
- Le bouclier vestibulaire corrige la ventilation orale en **ventilation nasale**.
- Les extensions "lip bumper" neutralisent les contractions musculaires de la zone labio-mentonnaire et favorisent la **croissance mandibulaire transversale**.
- **La forme de l'arcade maxillaire** respectant les valeurs de la charte de KORKHAUS **favorise l'occlusion latérale**.
- **La forme en U** est un conformateur de l'arcade mandibulaire.

MODE D'UTILISATION

- La **gouttière carrée** se place en bouche, **les masses bilatérales vers le bas sous la langue**. La langue se place alors naturellement en haut.
- Lorsque la gouttière est en bouche, la respiration **devient nasale**.
- La gouttière doit être portée de façon très régulière **2 heures par jour et toute la nuit**.
- **La gouttière se nettoie à l'eau froide** avec une brosse à dents et du dentifrice, avant et après chaque utilisation. Il faut bien rincer, sécher et ranger l'appareil dans sa boîte, toujours propre. Il est recommandé de le placer 1 fois par semaine dans un bain de bouche ou tout autre solution prescrite par le praticien.

Ne jamais faire bouillir la gouttière.

- Les premiers temps, la gouttière peut être perdue durant la nuit, c'est normal : **IL FAUT PERSÉVÉRER**.

SUIVRE SCRUPULEUSEMENT LES INDICATIONS DE VOTRE PRATICIEN.

Tout appareil défectueux doit être remplacé.

i

COMPOSITION INITIALE

- Matière de grade médical
- Colorant de grade alimentaire
- Sans phtalates, sans bisphénol, sans perturbateurs endocriniens

Dispositif médical de Classe I



CONTRE-INDICATIONS

- Ne convient pas aux enfants de moins de 36 mois



POUR D'AUTRES CONSEILS

OFFI vous guide tout au long de l'**espace particulier** du site internet, **fiches conseils**, **fiches pratiques** et **vidéos explicatives** ! N'hésitez pas à vous rendre sur :

www.innovapharm.fr

