

GOUTTIÈRES CLASSE III

ENFANTS À
PARTIR DE
5 ANS

Appareil d'interception
pour Classe III

**VENTILATION • DYSFONCTIONS LINGUALES
ET LABIALES**

- **Chez l'enfant** : en denture lactéale ou mixte, correction des troubles fonctionnels et occlusaux associés, dans un cadre préorthodontique.



ÉVOLUTION D'UN CAS SUR 7 MOIS

AVEC LE PORT DE LA GOUTTIÈRE CLASSE III




Décembre 2014



Juillet 2015

**Les gouttières Classe III sont fabriquées
et conditionnées en France**

 Laboratoires INNOVA PHARM
BP 30451 • 49304 CHOLET Cedex • FRANCE



ACTIONS DU DISPOSITIF MÉDICAL

- La gouttière Classe III favorise la **correction des dysfonctions linguales** telles que la pulsion linguale antérieure (suction de la langue) et la déglutition primaire (dans laquelle la langue s'interpose entre les arcades dentaires).
- Les **masses bilatérales** favorisent la rééducation linguale. La langue est placée en **position haute**.
- Le bouclier vestibulaire corrige la ventilation orale en **ventilation nasale**.
- Les extensions "lip bumper" neutralisent les contractions musculaires de la zone labio-mentonnaire et favorisent la **croissance mandibulaire**.
- La forme de l'arcade mandibulaire est circonscrite dans le périmètre de l'arcade maxillaire pour favoriser l'**engrènement des secteurs latéraux**.
- Le surplomb est augmenté pour la **correction des articulés incisifs croisés**.

MODE D'UTILISATION

- La **gouttière Classe III** se place en bouche, **les masses bilatérales vers le bas sous la langue**. La langue se place alors naturellement en haut.
- Lorsque la gouttière est en bouche, la respiration **devient nasale**.
- La gouttière doit être portée de façon très régulière **2 heures par jour et toute la nuit**.
- **La gouttière se nettoie à l'eau froide** avec une brosse à dents et une solution nettoyante, avant et après chaque utilisation. Il faut bien rincer, sécher et ranger l'appareil dans sa boîte, toujours propre. Il est recommandé de le placer 1 fois par semaine dans un bain de bouche ou tout autre solution prescrite par le praticien.

Ne jamais faire bouillir la gouttière.

- Les premiers temps, la gouttière peut être perdue durant la nuit, c'est normal : **IL FAUT PERSÉVÉRER**.

SUIVRE SCRUPULEUSEMENT LES INDICATIONS DE VOTRE PRATICIEN.
Tout appareil défectueux doit être remplacé.

i

COMPOSITION INITIALE

- Matière de grade médical
- Colorant de grade alimentaire
- Sans phtalates, sans bisphénol, sans perturbateurs endocriniens

Dispositif médical de Classe I



CONTRE-INDICATIONS

- Ne convient pas aux enfants de moins de 36 mois



Découvrez
l'espace patient sur

www.innovapharm.fr

avec les fiches conseils !

