

# GOUTTIÈRES CLASSE III

ENFANTS À  
PARTIR DE  
**5 ANS**

Appareil d'interception  
pour Classe III

**VENTILATION • DYSFONCTIONS LINGUALES  
ET LABIALES**

- **Chez l'enfant** : en denture lactéale ou mixte, correction des troubles fonctionnels et occlusaux associés, dans un cadre préorthodontique.



## ÉVOLUTION D'UN CAS SUR 7 MOIS

AVEC LE PORT DE LA GOUTTIÈRE CLASSE III



Décembre 2014



Juillet 2015

**Les gouttières Classe III sont fabriquées  
et conditionnées en France**

 Laboratoires INNOVA PHARM  
BP 30451 • 49304 CHOLET Cedex • FRANCE



## ACTIONS DU DISPOSITIF MÉDICAL

- La gouttière Classe III favorise la **correction des dysfonctions linguales** telles que la pulsion linguale antérieure (suction de la langue) et la déglutition primaire (dans laquelle la langue s'interpose entre les arcades dentaires).
- Les **masses bilatérales** favorisent la rééducation linguale. La langue est placée en **position haute**.
- Le bouclier vestibulaire corrige la ventilation orale en **ventilation nasale**.
- Les extensions "lip bumper" neutralisent les contractions musculaires de la zone labio-mentonnaire et favorisent la **croissance mandibulaire**.
- La forme de l'arcade mandibulaire est circonscrite dans le périmètre de l'arcade maxillaire pour favoriser l'**engrènement des secteurs latéraux**.
- Le surplomb est augmenté pour la **correction des articulés incisifs croisés**.

## MODE D'UTILISATION

- La **gouttière Classe III** se place en bouche, **les masses bilatérales vers le bas sous la langue**. La langue se place alors naturellement en haut.
- Lorsque la gouttière est en bouche, la respiration **devient nasale**.
- La gouttière doit être portée de façon très régulière **2 heures par jour et toute la nuit**.
- **La gouttière se nettoie à l'eau froide** avec une brosse à dents et une solution nettoyante, avant et après chaque utilisation. Il faut bien rincer, sécher et ranger l'appareil dans sa boîte, toujours propre. Il est recommandé de le placer 1 fois par semaine dans un bain de bouche ou tout autre solution prescrite par le praticien.

### Ne jamais faire bouillir la gouttière.

- Les premiers temps, la gouttière peut être perdue durant la nuit, c'est normal : **IL FAUT PERSÉVÉRER**.

### SUIVRE SCRUPULEUSEMENT LES INDICATIONS DE VOTRE PRATICIEN.

Tout appareil défectueux doit être remplacé.

i

#### COMPOSITION INITIALE

- Matière de grade médical
- Colorant de grade alimentaire
- Sans phtalates, sans bisphénol, sans perturbateurs endocriniens

**Dispositif médical de Classe I**



#### CONTRE-INDICATIONS

- Ne convient pas aux enfants de moins de 36 mois



#### POUR D'AUTRES CONSEILS

OFFI vous guide tout au long de l'**espace particulier** du site internet, **fiches conseils**, **fiches pratiques** et **vidéos explicatives** ! N'hésitez pas à vous rendre sur :

[www.innovapharm.fr](http://www.innovapharm.fr)

