

PROCCLUSEURS

ENFANTS À
PARTIR DE
6 ANS

INTERCEPTION • CONTENTION

- Le proccluseur peut être utilisé **dans le traitement interceptif des dysmorphoses**, ou comme **contention en fin de traitement**.



ÉVOLUTION D'UN CAS AVEC LE DU PROCCLUSEUR




Mai 2012



Mars 2013

**Les proccluseurs sont fabriqués
et conditionnés en France**

 Laboratoires INNOVA PHARM
BP 30451 • 49304 CHOLET Cedex • FRANCE



ACTIONS DU DISPOSITIF MÉDICAL

- Le proccluseur peut être utilisé en **interception** en denture mixte et lors de l'éruption des secteurs latéraux grâce aux pistes de guidage de l'occlusion.
- Il peut être placé comme appareil de **contention** après traitements multibagues ou fonctionnels.
- Il favorise la rééducation de la **ventilation**.
- Il peut aider à lever une **supraclusion**.

MODE D'UTILISATION

- Le **proccluseur** se place en bouche, **selon les indentations**.
- Lorsque le proccluseur est en bouche, la respiration **devient nasale**.
- Le proccluseur doit être porté de façon très régulière **2 heures par jour et toute la nuit**.
- **Le proccluseur se nettoie à l'eau froide** avec une brosse à dents et une solution nettoyante, avant et après chaque utilisation. Il faut bien rincer, sécher et ranger l'appareil dans sa boîte, toujours propre. Il est recommandé de le placer 1 fois par semaine dans un bain de bouche ou tout autre solution prescrite par le praticien.

Ne jamais faire bouillir le proccluseur.

- Les premiers temps, le proccluseur peut être perdu durant la nuit, c'est normal : **IL FAUT PERSÉVÉRER**.

SUIVRE SCRUPULEUSEMENT LES INDICATIONS DE VOTRE PRATICIEN.

Tout appareil défectueux doit être remplacé.



COMPOSITION INITIALE

- Matière de grade médical
- Colorant de grade alimentaire
- Sans phtalates, sans bisphénol, sans perturbateurs endocriniens

Dispositif médical de Classe I



CONTRE-INDICATIONS

- Ne convient pas aux enfants de moins de 6 ans
- Occlusion de Classe III



Découvrez
l'espace patient sur

www.innovapharm.fr

avec les fiches conseils !

