



L'ORTHODONTIE FONCTIONNELLE



VOICI NOTRE NOUVEAU CATALOGUE



LA QUALITÉ

Gamme médicale
Sans : phtalate, bisphénol,
perturbateur endocrinien

LA CRÉATION

Concepteur et fabricant
en France (49 Cholet)

L'INNOVATION

Répondant aux
évolutions des concepts
fonctionnels

LES SERVICES

Pour vos patients :
Vidéos, fiches, livrets...

LA DISPONIBILITÉ

Écoute et réactivité



Docteur Patrice NICOLLEAU
Orthodontiste et concepteur

Elisabeth ROBILLARD
Directrice commerciale

Laure DA COSTA
Responsable qualité et
assistante dentaire

Élodie CAILLEAU
Adjointe de direction

SOMMAIRE

VENTILATION - DÉGLUTITION - BÉANCE
les écrans 2

APPAREILS D'EXERCICES
le déglutix 3

INTERCEPTION POUR CLASSE I
VENTILATION -
DYSFONCTIONS LINGUALES ET LABIALES
la gouttière Classe I 4

INTERCEPTION POUR CLASSE II
VENTILATION -
DYSFONCTIONS LINGUALES ET LABIALES
la gouttière CFP 5
la gouttière Classe II 6
la gouttière Classe II bi-densité 7
la gouttière carrée 8

RONCHOPATHIE, BRUXISME ET
DYSFONCTIONS CRANIO-MANDIBULAIRES
la gouttière carrée 9
la gouttière Classe II bi-densité 9

INTERCEPTION POUR CLASSE III
la gouttière Classe III 10

INTERCEPTION - CONTENTION
le proccluseur 11

APPAREILS AUXILIAIRES
AU TRAITEMENT MULTIBAGUES
les gouttières bagues 12

APPAREILS INDIVIDUALISÉS
LA GAMME MODULABLE
la gouttière Classe II modulable 14
le proccluseur modulable 14
le fonctionnel F0 modulable 15
le fonctionnel F1 modulable 15

NOS SERVICES POUR VOS PATIENTS
les livrets 16
les fiches 17
les vidéos 17

NOTRE SITE INTERNET
espace particulier 18
espace professionnel 19

NOS SOLUTIONS EN ORTHODONTIE... 20

MODE D'UTILISATION DES APPAREILS . 22

ENTRETIEN DES APPAREILS 23

COMPOSITION DES APPAREILS 23

NOS JOURNÉES DE FORMATION 24

VENTILATION DÉGLUTITION BÉANCE



Écran orthodontique E.O

2 tailles

Écran orthodontique
avec butée E.O.B



LES ÉCRANS SIMPLES

Enfants à partir de 5 ans

Densité

- taille small : **1 densité** (souple)
- taille large : **2 densités** (souple, rigide)

Actions

- **L'écran exerce une pression sur les incisives supérieures** lorsqu'il existe un décalage antéropostérieur entre les dents et diminue les contractions des joues à l'origine des palais étroits.
- **La respiration doit être exclusivement nasale.** L'écran permet à l'enfant d'acquies cette respiration et ainsi de développer harmonieusement son maxillaire et sa mandibule.
- **La déglutition se réalise dents serrées.** L'interposition de l'écran entre les lèvres et les dents empêche le contact lèvre-langue à l'origine des béances antérieures.
- **L'écran est un substitut de la succion du doigt ou de la sucette.** Il peut faire disparaître cette habitude nocive et rétablir un environnement fonctionnel favorable à la croissance harmonieuse des mâchoires et des dents.

Contre-indications

- Ne convient pas aux enfants de moins de 36 mois.
- Occlusions de classe III ou tendances prognathiques.
- Respirateurs buccaux exclusifs.

LES ÉCRANS AVEC BUTÉE

Densité

- **1 densité** (souple)

Actions identiques à l'écran simple

Action spécifique de l'écran avec butée

- **L'écran orthodontique avec butée (EOB) est conseillé dans les cas de décalages dentaires**, lorsque la mâchoire inférieure est en retrait. La butée entraîne une propulsion mandibulaire et oriente la langue vers les papilles palatines pour une déglutition secondaire.

Contre-indications

- Ne convient pas aux enfants de moins de 36 mois.
- Occlusions de classe III ou tendances prognathiques.
- Respirateurs buccaux exclusifs.

LE DÉGLUTIX

2 tailles

Écran conçu spécifiquement pour la rééducation de la déglutition secondaire par action réflexe.

Densité

- 1 densité (souple)

Actions

- La présence du bouclier empêche la langue de se projeter entre les lèvres, il n'y a plus de contact lèvres-langue initiateur de la déglutition primaire (dysfonctionnelle).
- Les aérateurs placés au niveau des extensions labiales, rendent impossible la réalisation d'un joint étanche par les lèvres.
- Afin de déglutir, l'enfant doit serrer les dents et placer sa langue contre son palais. Il réalise ainsi une déglutition secondaire correcte.
- Cette nouvelle déglutition se fait **SANS ACTION CONSCIENTE**. L'apprentissage s'effectue **SPONTANÉMENT**.

Contre-indications

- Ne convient pas aux enfants de moins de 36 mois.

Évolution d'un cas, à 3 mois, avec le port du déglutix

Décembre 2016



Février 2017



INTERCEPTION POUR CLASSE I

VENTILATION - DYSFONCTIONS LINGUALES ET LABIALES



Gouttière Classe I médium

LA GOUTTIÈRE CLASSE I

Enfants à partir de 5 ans et adultes

4 tailles

- **Chez l'enfant** : correction des troubles fonctionnels et occlusaux dans un cadre préorthodontique.
- **Chez l'adulte** : traitement de la ronchopathie. Relâchement musculo-articulaire.

Densité

- taille small, middle, large : **3 densités** (souple, médium, rigide)
- taille X-large : **2 densités** (souple, médium)

Actions

- **La gouttière Classe I favorise la correction des dysfonctions linguales** telles que la pulsion linguale antérieure (suction de la langue) et la déglutition.
- **La langue est placée en position haute** grâce aux masses bilatérales (Brevet Innova Pharm).
- **Le bouclier vestibulaire** corrige la ventilation orale en ventilation nasale.
- **Les extensions "lip bumper"** neutralisent les contractions musculaires de la zone labio-mentonnière et favorisent la croissance mandibulaire.
- La forme de **l'arcade mandibulaire** est circonscrite dans le périmètre de l'arcade maxillaire pour favoriser **l'engrènement des secteurs latéraux**.
- La mandibule reste positionnée en Classe I.

Contre-indications

- Ne convient pas aux enfants de moins de 36 mois.

INTERCEPTION POUR CLASSE II

VENTILATION DYSFONCTIONS LINGUALES ET LABIALES



LA GOUTTIÈRE CFP

Enfants à partir de 6 ans

Taille unique

Densité

■ 3 densités (souple, médium, rigide)

Actions

- **Aide** à corriger la ventilation par la présence d'un bouclier vestibulaire.
- **Permet** par son ascenseur lingual (masses bilatérales), l'établissement de la déglutition secondaire.
- **Place** la langue en position haute grâce aux masses bilatérales.
- **Favorise** l'éruption correcte des dents dans un cadre préorthodontique.

Contre-indications

- Ne convient pas aux enfants de moins de 36 mois.



Gouttière CFP souple



Gouttière CFP médium



Gouttière CFP rigide



Gouttière Classe II souple



Gouttière Classe II médium



Gouttière Classe II rigide

INTERCEPTION POUR CLASSE II

VENTILATION - DYSFONCTIONS LINGUALES ET LABIALES



LA GOUTTIÈRE CLASSE II

Enfants à partir de 6 ans et adultes

4 tailles

Agit comme la gouttière CFP.

Densité

- taille small, middle, large : **3 densités** (souple, médium, rigide)
- taille X-large : **2 densités** (souple, médium)

Actions spécifiques des gouttières Classe II

- **Les extensions "lip bumper"** neutralisent les contractions musculaires de la zone labio-mentonnaire et favorisent la croissance mandibulaire transversale.
- **L'arcade mandibulaire** est circonscrite dans le périmètre de l'arcade maxillaire pour favoriser **l'engrènement des secteurs latéraux**.
- **Aide au soulagement** des ATM chez l'adulte.

Contre-indications

- Ne convient pas aux enfants de moins de 36 mois.

 La gouttière Classe II existe aussi en gamme modulable (**page 14**).

LA GOUTTIÈRE CLASSE II BI-DENSITÉ

Enfants à partir de 6 ans

3 tailles

small, middle et large

- **Première gouttière associant, grâce à un procédé de fabrication innovant et breveté, 2 densités différentes d'une même matière ;** cette gouttière permet d'allier la souplesse en regard des parties fragiles (lèvres, joues et langue) et la rigidité au niveau des arcades dentaires.
- L'association de 2 densités d'une même matière élimine les risques de rupture rencontrés lorsque l'on associe des matières différentes de densités différentes.

Densité

- souple/médium
- médium/rigide

Actions

- **Le bouclier vestibulaire**, permettant l'établissement d'une ventilation nasale, **est souple** protégeant ainsi les lèvres et les joues des blessures.
- **Les arcades dentaires, plus rigides** (médium ou rigide), limitent les déformations de la gouttière afin d'optimiser le développement et l'établissement de l'occlusion.
- **L'arcade maxillaire circonscrivant l'arcade mandibulaire respecte l'occlusion transversale.**
- **Le montage en bout à bout** favorise l'hypercorrection des Classe II.
- **Le renfort des "lips bumper"** en augmente l'efficacité.

Contre-indications

- Ne convient pas aux enfants de moins de 36 mois.

INTERCEPTION POUR CLASSE II

VENTILATION DYSFONCTIONS LINGUALES ET LABIALES



Gouttière Classe II Bi-densité souple/médium



Gouttière Classe II Bi-densité médium/rigide

INTERCEPTION POUR CLASSE II

VENTILATION - DYSFONCTIONS LINGUALES ET LABIALES



Gouttière carrée médium



LA GOUTTIÈRE CARRÉE

Enfants et adultes

10 tailles, se mesure à l'aide d'un tableau de concordance correspondant à la Charte de KORKHAUS (disponible sur www.innovapharm.fr, dans la fiche produit)

Seul appareil fonctionnel conçu selon la Charte de KORKHAUS.

Densité

- 1 densité (médium)

Actions

- **Interception en denture mixte**, en complément ou en sortie des pistes de PLANAS.
- **Permet des exercices de mastication** unilatérale alternée.
- **La forme en U** est un conformateur de l'arcade mandibulaire.
- **La forme de l'arcade maxillaire** respectant les valeurs de la charte de KORKHAUS favorise l'occlusion latérale.
- **Le bouclier vestibulaire corrige la ventilation orale.**
- **Les extensions "lip bumper" neutralisent les contractions** de la zone labio-mentonnière et **favorisent la croissance mandibulaire transversale.**
- **Le plan de propulsion libère la mandibule** et favorise l'établissement de la déglutition secondaire.
- **La langue est placée en position haute** grâce aux masses bilatérales inférieures.

Mastication

Des **exercices de mastication** peuvent être réalisés suivant les indications du praticien.

Contre-indications

- Ne convient pas aux enfants de moins de 5 ans.

Évolution d'un cas avec le port de la gouttière carrée

Décembre 2010

Décembre 2011



RONCHOPATHIE (RONFLEMENT SANS APNÉE) BRUXISME DYSFONCTIONS CRÂNIO-MANDIBULAIRES



Gouttière carrée

LA GOUTTIÈRE CARRÉE

Contre-indications

- Ne convient pas aux enfants de moins de 5 ans.

 Voir les caractéristiques en **page 8**.

LA GOUTTIÈRE CLASSE II BI-DENSITÉ

 Voir les caractéristiques en **page 7**.



Gouttière Classe II Bi-densité souple/medium

Gouttière Classe II Bi-densité medium/rigide



INTERCEPTION POUR CLASSE III

VENTILATION - DYSFONCTIONS LINGUALES ET LABIALES



LA GOUTTIÈRE CLASSE III

Enfants à partir de 4 ans

2 tailles

small et middle

Densité

- 2 densités (souple, médium)

Actions

- Favorise la correction des dysfonctions linguales telles que la pulsion linguale antérieure (suction de la langue) et la déglutition primaire.
- Place la langue en position haute grâce aux masses bilatérales.
- Les extensions "lip bumper" neutralisent les contractions musculaires de la zone labiomentonnière et favorisent la croissance mandibulaire transversale.
- Le bouclier vestibulaire corrige la ventilation orale en ventilation nasale.
- Le surplomb incisif est augmenté pour la correction des articulés incisifs croisés.
- La forme en U de l'arcade mandibulaire est circonscrite dans le périmètre de l'arcade maxillaire pour favoriser l'engrènement des secteurs latéraux.

Contre-indications

- Ne convient pas aux enfants de moins de 36 mois.

Évolution d'un cas, en 7 mois, avec le port de la gouttière Classe III

Décembre 2014




Juillet 2015



Gouttière Classe III médium

Coupe transversale
(image de synthèse)

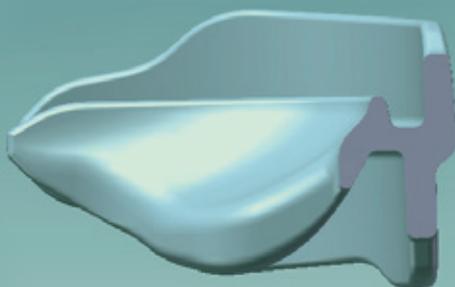



LE PROCCLUSEUR

Enfants à partir de 6 ans

8 tailles, se mesure à l'aide d'une réglette

Actions

- **Après une phase d'interception** afin de stabiliser le résultat obtenu et attendre l'éruption des secteurs latéraux grâce aux pistes de guidage de l'occlusion.
- **En contention** après traitements multibagues. Indentations de 14 à 24 et de 34 à 44. Les pistes postérieures libèrent l'occlusion molaire pour une mise en fonction physiologique.
- **Rééducation** de la ventilation nasale.

Contre-indications

- Ne convient pas aux enfants de moins de 6 ans.
- Occlusion de Classe III.

 Le proccluseur existe aussi en gamme modulable (**page 14**).

Proccluseur

APPAREILS AUXILIAIRES AU TRAITEMENT MULTIBAGUES



LES GOUTTIÈRES BAGUES

Enfants à partir de 10 ans

Bi-maxillaires

- avec masses bi-latérales
- sans masses bi-latérales

Uni-maxillaires

- avec masses bi-latérales

Gouttières Bagues



APPAREILS AUXILIAIRES AU TRAITEMENT MULTIBAGUES



Taille unique

Actions

- La présence de masses bi-latérales permet de continuer la rééducation combinée de la déglutition et de la posture linguale.
- Favorise l'établissement de la ventilation nasale.
- Favorise le travail des tractions intermaxillaires en plaçant les arcades dentaires en bout à bout (possibilité d'adapter l'appareil en le coupant avec des ciseaux).
- Protège les tissus mous (lèvres, joues) lors de la période d'adaptation aux multibagues.
- Gouttière bagues uni-maxillaire : aide à la rééducation linguale lorsque seule l'arcade maxillaire est baguée.

Contre-indications

- Ne convient pas aux enfants de moins de 6 ans.
- Occlusion de Classe III.
- Respirateurs buccaux exclusifs.



Coupe verticale (image de synthèse)
Présence d'une gorge pour les brackets maxillaires et mandibulaires



Gouttière bagues bi-maxillaire avec masses bi-latérales

Gouttière bagues uni-maxillaire avec masses bi-latérales



APPAREILS INDIVIDUALISÉS LA GAMME MODULABLE



Gouttière Classe II modulable

Proccluseur modulable



Enfants à partir de 6 ans

- Permet d'obtenir une gouttière **individualisée SANS phase de laboratoire**.
- **Pas de prise d'empreinte** : confort du patient.
- **Réalisation de la gouttière au cabinet** : gain de temps.

LA GOUTTIÈRE CLASSE II MODULABLE

Taille unique

Actions

- **Les extensions "lip bumper"** neutralisent les contractions musculaires de la zone labio-mentonnière et favorisent la croissance mandibulaire transversale.
- **L'arcade mandibulaire** est circonscrite dans le périmètre de l'arcade maxillaire pour favoriser **l'engrènement des secteurs latéraux**.

Contre-indications

- Ne convient pas aux enfants de moins de 36 mois.

LE PROCCLUSEUR MODULABLE

8 tailles, se mesure à l'aide d'une règlette

Actions

- **Après une phase d'interception** afin de stabiliser le résultat obtenu et attendre l'éruption des secteurs latéraux grâce aux pistes de guidage de l'occlusion.
- **En contention** après traitements multibagues permet une individualisation de l'appareil (en tenant compte de la largeur des arcades, de la variabilité des formes et des axes coronaires). Les pistes postérieures libèrent l'occlusion molaire pour une mise en fonction physiologique.
- **Rééducation** de la ventilation nasale.

Contre-indications

- Ne convient pas aux enfants de moins de 6 ans.
- Occlusion de Classe III.



Les vidéos du montage des appareils sont disponibles sur :
[www.innovapharm.fr / fiches produits](http://www.innovapharm.fr/fiches-produits).

Enfants à partir de 8 ans

Taille unique

- Permet d'obtenir une gouttière **individualisée SANS phase de laboratoire.**
- **Pas de prise d'empreinte** : confort du patient.
- **Réalisation de la gouttière au cabinet** : gain de temps.

LE FONCTIONNEL F0 MODULABLE

Actions

- **Propulsion** mandibulaire par le plan de glissement inférieur.
- **Rééducation** de la posture linguale et de la déglutition par les masses bilatérales inférieures plaçant la langue en position haute.
- **Développement** de la ventilation nasale par l'écran vestibulaire.
- **Expansion transversale** maxillaire.
- Effet "**Monobloc**".

Contre-indications

- Ne convient pas aux enfants de moins de 6 ans.
- Occlusion de classe III.

LE FONCTIONNEL F1 MODULABLE (avec arc facial)

Actions

- **Propulsion** mandibulaire par le plan de glissement inférieur.
- **Rééducation** de la posture linguale et de la déglutition par les masses bilatérales inférieures plaçant la langue en position haute.
- **Normalisation** de l'axe et de l'alignement des incisives supérieures grâce à l'appui vestibulaire.
- **Traction** antéro-postérieure sur le maxillaire par l'arc facial intégré (F1 et F1 modulable).
- **Développement** de la ventilation nasale par l'écran vestibulaire.

Contre-indications

- Ne convient pas aux enfants de moins de 6 ans.
- Occlusion de classe III.

 Les vidéos du montage des appareils sont disponibles sur : [www.innovapharm.fr / fiches produits](http://www.innovapharm.fr/fiches-produits).

APPAREILS INDIVIDUALISÉS LA GAMME MODULABLE



Fonctionnel F0 modulable



Fonctionnel F1 modulable

NOS SERVICES POUR VOS PATIENTS

LES LIVRETS

LIVRET D'ORTHODONTIE FONCTIONNELLE

- Ce livret est destiné aux parents de vos patients. Il les informe sur l'intérêt de la rééducation fonctionnelle, en abordant les notions de ventilation, de déglutition, de mastication et de posture.
- Livret de 8 pages, format 14.7x21, avec emplacement au verso pour apposer le cachet du cabinet, sans mention "Innova Pharm".



LIVRET DU PATIENT

- Ce livret est destiné aux patients. Il les conseille notamment sur l'hygiène dentaire, le port de leur appareil et son entretien. Il optimise le suivi de leur traitement.
- Livret de 10 pages, dont un rabat pour ranger la fiche de port, format 14.7x21 cm, sans mention "Innova Pharm".

NOS SERVICES POUR VOS PATIENTS

LES FICHES


LES FICHES CONSEILS

Elles sont à télécharger gratuitement sur :

www.innovapharm.fr/
espace particulier / fiches conseils

LES FICHES D'INFORMATIONS ET LA FICHE DE PORT

Elles sont offertes sous format papier lors de votre commande.

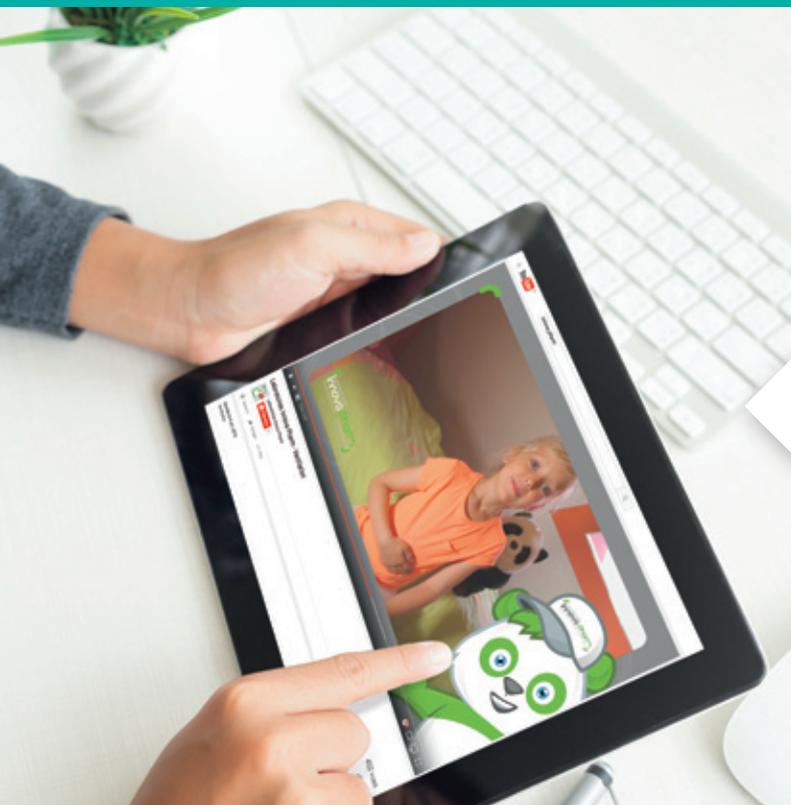

LES VIDÉOS

Vos patients peuvent les visionner sur :

www.innovapharm.fr

ou sur Youtube
en tapant Innovapharm

Si vous souhaitez recevoir une clé USB contenant les vidéos, pour les diffuser dans votre salle d'attente ou les montrer de votre ordinateur à vos patients, faites votre demande sur :

mail@innovapharm.fr

NOTRE SITE INTERNET : ESPACE PARTICULIER

UN ESPACE DÉDIÉ À VOS PATIENTS OÙ ILS PEUVENT DÉCOUVRIR :

Des informations sur les troubles fonctionnels, les fiches conseils, les questions fréquentes et la rubrique "mon traitement en vidéos".



NOTRE SITE INTERNET : ESPACE PROFESSIONNEL

DÉCOUVREZ NOTRE SITE :
www.innovapharm.fr

DES INFORMATIONS DÉTAILLÉES :

Elles vous permettront de découvrir et d'apprécier notre gamme d'appareils fonctionnels.

LE SITE MARCHAND :

Il vous offre la liberté de commander quand vous le souhaitez et de régler par chèque, carte bancaire ou par virement.

NOS VIDÉOS :

- Le déglutix
- La ventilation
- La déglutition
- Le port et l'entretien de l'appareil
- Le montage des appareils individualisés (gamme modulaire)



NOS SOLUTIONS EN ORTHODONTIE



	DYSFONCTIONS					PARAFONCTIONS		
	Ventilation	Déglutition	Posture linguale	Compétence labiale	Mastication	Succion doigt	Tétage langue, lèvres...	Sucette
4 à 8 ans	EO / Gt CFP Gt Carrée Gt*	Gt CFP / Gt* Gt Carrée Déglutix	Gt CFP / Gt* Gt Carrée	EO	Gt Carrée	Déglutix EO / EOB	EO / Gt CFP Gt* Gt Carrée Déglutix	Déglutix EO / EOB
8 à 12 ans	EO / Gt* Gt Carrée	Gt* Gt Carrée Déglutix	Gt* Gt Carrée	EO	Gt Carrée	Déglutix EO / EOB	Gt* Gt Carrée Déglutix	
12 à 16 ans	EO / Gt* Gt Carrée	Gt* Gt Carrée	Gt* Gt Carrée	EO	Gt Carrée		Gt* Gt Carrée	
Adultes	EO Gt Cl2 / Gt Cl1 Gt Carrée	Gt Cl2 / Gt Cl1 Gt Carrée	Gt Cl2 Gt Carrée	EO	Gt Carrée			

EO : Écran Orthodontique / **EOB** : Écran Orthodontique avec Butée

Gt CFP : Gouttière Correction Fonction Prévention / **Gt Cl1** : Gouttière Classe I

Gt Cl2 : Gouttière Classe II standard ou bi-densité / **Gt Cl3** : Gouttière Classe III

Gt Carrée : Gouttière Carrée

Gt Bagues : Gouttière Bagues bi-maxillaire ou uni-maxillaire

PRO : Proccluseur / **PRO m** : Proccluseur modulable

FO m : Fonctionnel 0 modulable / **F1 m** : Fonctionnel 1 modulable

Gt* : Gouttière selon la classe dentaire (I, II ou III)

ANOMALIES DENTAIRES

	Classe 1 DDM	Classe 1 deep bite	Classe 1 open bite	Classe 2 deep bite	Classe 2 open bite	Classe 2 unilatérale	Classe 3 articulé incisif croisé	Articulé croisé latéral
4 à 8 ans	Gt CFP Gt CI1 Gt Carrée	Gt CFP Gt CI1 Gt Carrée	Gt CFP Gt CI1 Gt Carrée	Gt CFP Gt CI2 Gt Carrée	EOB / Gt CFP Gt CI2 Gt Carrée	Gt Carrée / Gt Gt CFP Gt CI2	Gt CI3	Gt* Gt Carrée
8 à 12 ans	PRO / Gt CI1 Gt Carrée	PRO / Gt CI1 Gt Carrée	Gt CI1 Gt Carrée	Gt CI2 Gt Carrée PRO	Gt CI2 Gt Carrée	Gt CI2 Gt Carrée PRO	Gt CI3	Gt* Gt Carrée
12 à 16 ans	PRO / Gt CI1 Gt Carrée	PRO / Gt CI1 Gt Carrée	Gt CI1 Gt Carrée	Gt CI2 Gt Carrée PRO	Gt CI2 Gt Carrée	Gt CI2 Gt Carrée PRO	Gt CI3	Gt* Gt Carrée

ANOMALIES DENTO-SQUELETTIQUES

	Classe 2 pro maxillie	Classe 2 rétro mandibulie	Classe 2 pro / rétro	Classe 3 modérée	MULTIBAGUES	BRUXISME DCM	RONCHOPATHIE	CONTENTION STABILISATION
4 à 8 ans	Gt CFP Gt CI2 Gt Carrée	Gt CFP Gt CI2 Gt Carrée	Gt CFP Gt CI2 Gt Carrée	Gt CI3		Gt* Gt Carrée	Gt* Gt Carrée	Gt CI1 Gt Carrée
8 à 12 ans	F0 m F1 m	F0 m	F0 m F1 m	Gt CI3	Gt Bagues	Gt* Gt Carrée	Gt* Gt Carrée	PRO / PRO m Gt CI1 Gt Carrée
12 à 16 ans	F0 m F1 m	F0 m	F0 m F1 m	Gt CI3	Gt Bagues	Gt* Gt Carrée	Gt* Gt Carrée	PRO / PRO m Gt CI1 Gt Carrée
Adultes					Gt Bagues	Gt* Gt Carrée	Gt CI1 Gt CI2 Gt Carrée	PRO / PRO m Gt CI1 Gt Carrée

MODE D'UTILISATION DES APPAREILS

Le déglutix :

Comment se positionne le déglutix en bouche ? voir photo page 3.

Un port diurne de 30 minutes est nécessaire. L'enfant ne doit pas penser à son appareil. Il le porte en réalisant une autre activité qui accapare sa concentration : la lecture, la télévision ou un jeu vidéo.

Le port nocturne et les exercices ne sont pas obligatoires.

L'écran :

L'écran se positionne librement entre les dents et les lèvres.

La gouttière CFP, la gouttière Classe I, la gouttière Classe II (standard et bi-densité), la gouttière Classe III, la gouttière Carrée, la gouttière modulable, le F0, les gouttières bagues avec masses bi-latérales (uni ou bi-maxillaires) :

La gouttière se place en bouche, les masses bilatérales vers le bas sous la langue.

La langue se place alors naturellement en haut et en avant.

Le proccluseur, le proccluseur modulable :

Des indentations de prémolaires à prémolaires sont prévues pour permettre l'évolution et le placement des dents.

La gouttière bagues sans masses bi-latérales :

La gouttière se positionne aussi bien dans un sens que dans l'autre.

Les appareils avec arcs faciaux : F1 modulable :

L'utilisation est la même que pour les CFP, Classe II **Cependant, l'enfant doit positionner et ôter l'appareil sans tirer sur les branches.**



Lorsque l'appareil est en bouche la ventilation devient nasale.

Le port diurne recommandé est de 2 h. Des exercices de mastication, de ventilation et de déglutition peuvent être réalisés.

Le port nocturne favorise l'établissement de la ventilation nasale réflexe et l'automatisation de la déglutition secondaire.

Le matin, il existe une sensibilité sur les dents antérieures ; elle disparaît rapidement et témoigne de l'action de la gouttière sur le bloc incisivo-canin. Les premiers temps (jusqu'à 4 semaines environ), le patient perd souvent sa gouttière la nuit : c'est normal il faut persévérer car la rééducation fonctionnelle est un processus long.

ENTRETIEN DES APPAREILS

- Tous nos appareils se nettoient à l'eau froide avec brosse à dents et dentifrice, avant et après chaque utilisation.
- Il est recommandé de placer l'appareil 1 heure par semaine dans un bain de bouche.
- Ne jamais le faire bouillir.



COMPOSITION DES APPAREILS

Nos appareils sont produits à partir de matières de grade médical et de colorants alimentaires répondant aux normes FDA, USP Classe VI et ne contenant ni bisphénol, ni phtalates, ni PVC.

NOS JOURNÉES DE FORMATION

UNE FORMATION
THÉORIQUE,
PRATIQUE
ET CLINIQUE.

Les dates vous sont communiquées sur :

www.innovapharm.fr
espace professionnel, onglet actualité



LABORATOIRES
Innova pharm
CONCEPTEURS & FABRICANTS



LABORATOIRES
Innova Pharm
CONCEPTEURS & FABRICANTS



100 avenue de Nantes • BP30451
49304 CHOLET Cedex • FRANCE

02 41 58 78 37

06 22 20 62 48

mail@innovapharm.fr

www.innovapharm.fr

