





L'ORTHODONTIE FONCTIONNELLE
• depuis 20 ans •

FABRICATION FRANÇAISE



Orthodontie fonctionnelle

DEPUIS 20 ANS

Depuis 20 ans les laboratoires Innova Pharm se consacrent EXCLUSIVEMENT au développement de l'orthodontie fonctionnelle.

Nous souhaitons apporter le meilleur, non seulement dans la qualité de nos produits qui répondent tous aux normes FDA et USP classe VI, mais aussi dans la qualité de notre relation, relation que nous voulons empreinte de simplicité, de proximité et de disponibilité.



LES 👆 D'INNOVA PHARM

LA CRÉATION

Concepteur et fabricant en France (49 Cholet)

L'INNOVATION

Répondant aux évolutions des concepts fonctionnels

LA QUALITÉ

Gamme médicale Sans : phtalate, bisphénol, perturbateur endocrinien

LES SERVICES

Pour vos patients : Vidéos, fiches, livrets et carnet de traitement

LA DISPONIBILITÉ

Écoute et réactivité

LÉGENDES



Ventilation



Déglutition



Mastication

VOS INTERLOCUTEURS

Dr Patrice NICOLLEAU

Irthodontiste et concepteur

Laure DA COSTA

Responsable qualité et assistante dentaire

Elisabeth ROBILLARD

Directrice commerciale

Élodie CAILLEAU

Adjointe de direction

Charlotte GARREAU

Chargée de développement commercial et marketing

SOMMAIRE VENTILATION - DÉGLUTITION - BÉANCE APPAREIL D'EXERCICE le déglutix 3 INTERCEPTION POUR CLASSE I VENTILATION - DYSFONCTIONS LINGUALES ET LABIALES la gouttière Classe I 4 INTERCEPTION POUR CLASSE II VENTILATION - DYSFONCTIONS LINGUALES ET LABIALES la gouttière Classe II5 INTERCEPTION POUR CLASSE II VENTILATION - DYSFONCTIONS LINGUALES ET LABIALES RONCHOPATHIE. BRUXISME ET DYSFONCTIONS CRANIO-MANDIBULAIRES INTERCEPTION POUR CLASSE III VENTILATION - DYSFONCTIONS LINGUALES ET LABIALES

la gouttière Classe III8

le proccluseur 9

APPAREILS AUXILIAIRES AU TRAITEMENT MULTIBAGUES

les gouttières bagues 10

INTERCEPTION - CONTENTION

APPAREILS INDIVIDUALISÉS / LA GAMME MODULABLE
la gouttière Classe II modulable
le proccluseur modulable
le fonctionnel F0 modulable
NOS SERVICES POUR VOS PATIENTS
les livrets et le carnet de traitement 14
les fiches 15
les vidéos pour vos patients 15
NOTRE SITE INTERNET
espace particulier
espace professionnel
espace professionnel
espace professionnel
nos solutions en orthodontie 18
NOS SOLUTIONS EN ORTHODONTIE
NOS SOLUTIONS EN ORTHODONTIE
NOS SOLUTIONS EN ORTHODONTIE

VENTILATION DÉGLUTITION BÉANCE







LES ÉCRANS SIMPLES

Enfants à partir de 5 ans

ÉCRAN ORTHODOINTIQUE

Actions

- L'écran exerce une pression sur les incisives supérieures lorsqu'il existe un décalage antéropostérieur entre les dents et diminue les contractions des joues à l'origine des palais étroits.
- La respiration doit être exclusivement nasale. L'écran permet à l'enfant d'acquérir cette respiration et ainsi de développer harmonieusement son maxillaire et sa mandibule.
- La déglutition se réalise dents serrées. L'interposition de l'écran entre les lèvres et les dents empêche le contact lèvre-langue à l'origine des béances antérieures.
- L'écran est un substitut de la succion du doigt ou de la sucette. Il peut faire disparaître cette habitude nocive et rétablir un environnement fonctionnel favorable à la croissance harmonieuse des mâchoires et des dents.

2 tailles

Toille et densité

- TAILLE SMALL :1 densité (souple)
- TAILLE LARGE : 2 densités (souple, rigide)

Contre-indications

- Ne convient pas aux enfants de moins de 36 mois.
- Occlusions de classe III ou tendances prognathiques.
- Respirateurs buccaux exclusifs.

LES ÉCRANS AVEC BUTÉE

Actions identiques à l'écran simple

Action spécifique de l'écran avec butée

 L'écran orthodontique avec butée (EOB) est conseillé dans les cas de décalages dentaires, lorsque la mâchoire inférieure est en retrait. La butée entraîne une propulsion mandibulaire et oriente la langue vers les papilles palatines pour une déglutition secondaire.

2 tailles

Taille et densité

• TAILLE SMALL, LARGE : 1 densité (souple).

Contre-indications

- Ne convient pas aux enfants de moins de 36 mois.
- Occlusions de classe III ou tendances prognathiques.
- Respirateurs buccaux exclusifs.

LE DÉGLUTIX

Enfants à partir de 5 ans

Écran conçu spécifiquement pour la rééducation de la déglutition secondaire par action réflexe.

Actions

- La présence du bouclier empêche la langue de se projeter entre les lèvres, il n'y a plus de contact lèvres-langue initiateur de la déglutition primaire (dysfonctionnelle).
- Les aérateurs placés au niveau des extensions labiales, rendent impossible la réalisation d'un joint étanche par les lèvres.
- Afin de déglutir, l'enfant doit serrer les dents et placer sa langue contre son palais. Il réalise ainsi une déglutition secondaire correcte.
- Cette nouvelle déglutition se fait SANS ACTION CONSCIENTE.
 L'apprentissage s'effectue
 SPONTANÉMENT.



Taille et densité

• TAILLE SMALL, LARGE : 1 densité (souple)

Contre-indications

 Ne convient pas aux enfants de moins de 36 mois.

Existe en 3 couleurs





ÉVOLUTION D'UN CAS, à 3 mois, avec le port du déglutix

Décembre 2016

Février 2017

APPAREIL D'EXERCICE DE 1^{ère} INTENTION







INTERCEPTION POUR CLASSE I

VENTILATION DYSFONCTIONS
LINGUALES
ET LABIALES









LA GOUTTIÈRE CLASSE I



Enfants à partir de 5 ans et adultes :

- **Chez l'enfant :** correction des troubles fonctionnels et occlusaux dans un cadre préorthodontique.
- Chez l'adulte: traitement de la ronchopathie. Relâchement musculoarticulaire.

Actions

- La gouttière Classe I favorise la correction des dysfonctions linguales telles que la pulsion linguale antérieure (succion de la langue) et la déglutition.
- La langue est placée en position haute grâce aux masses bilatérales (Brevet Innova Pharm).
- Le bouclier vestibulaire corrige la ventilation orale en ventilation nasale.
- Les extensions "lip bumper" neutralisent les contractions musculaires de la zone labio-mentonnière et favorisent la croissance mandibulaire.
- La forme de l'arcade mandibulaire est circonscrite dans le périmètre de l'arcade maxillaire pour favoriser l'engrènement des secteurs latéraux.
- La mandibule reste positionnée en Classe I.

4 tailles

Toille et densité

- TAILLE SMALL, MIDDLE, LARGE:
 3 densités
 (souple, médium, rigide)
- TAILLE X-LARGE : 2 densités (souple, médium)

Contre-indications

 Ne convient pas aux enfants de moins de 36 mois.

EXISTE EN BI-DENSITÉ

1 taille (middle) 2 densités (souple/médium, médium/rigide)



AVANTAGES DE LA GOUTTIÈRE BI-DENSITÉ

 Grâce à un procédé innovant et breveté, elle associe 2 densités différentes d'une même matière

LA GOUTTIÈRE CLASSE II



Enfants à partir de 5 ans et adultes

Actions

- Aide à corriger la ventilation par la présence d'un bouclier vestibulaire.
- Permet par son ascenseur lingual (masses bilatérales), l'établissement de la déglutition secondaire.
- **Place** la langue en position haute grâce aux masses bilatérales.
- **Favorise** l'éruption correcte des dents dans un cadre préorthodontique.
- Les extensions "lip bumper" neutralisent les contractions musculaires de la zone labio-mentonnière et favorisent la croissance mandibulaire transversale.
- L'arcade mandibulaire est circonscrite dans le périmètre de l'arcade maxillaire pour favoriser l'engrènement des secteurs latéraux.
- Aide au soulagement des ATM chez l'adulte.

4 tailles

Taille et densité

- TAILLE SMALL, MIDDLE, LARGE:
 3 densités
 (souple, médium, rigide)
- TAILLE X-LARGE : 2 densités (souple, médium)

Contre-indications

 Ne convient pas aux enfants de moins de 36 mois.



- Elle permet d'allier la souplesse en regard des parties fragiles (lèvres, joues) et la rigidité au niveau des arcades dentaires.
- Elle assure une plus grande longévité car les parties recevant les forces occlusales sont renforcées.



INTERCEPTION POUR CLASSE II

VENTILATION DYSFONCTIONS
LINGUALES
ET LABIALES









EXISTE EN BI-DENSITÉ

3 tailles (small, middle, large)

2 densités

(souple/médium, médium/rigide)

INTERCEPTION POUR CLASSE II

VENTILATION DYSFONCTIONS
LINGUALES
ET LABIALES









Enfants à partir de 6 ans

Actions

- Aide à corriger la ventilation par la présence d'un bouclier vestibulaire.
- Permet par son ascenseur lingual (masses bilatérales), l'établissement de la déglutition secondaire.
- **Place** la langue en position haute grâce aux masses bilatérales.
- **Favorise** l'éruption correcte des dents dans un cadre préorthodontique.

Taille unique

Taille et densité

GOUTTIÈRE

• TAILLE UNIQUE : 3 densités (souple, médium, rigide)

Contre-indications

 Ne convient pas aux enfants de moins de 36 mois.



Gouttière CFP souple



Gouttière CFP médium



Gouttière CFP rigide





LA GOUTTIÈRE CARRÉE



Enfants à partir de 5 ans et adultes

Seul appareil fonctionnel conçu selon la Charte de KORKHAUS

Actions

- Interception en denture mixte, en complément ou en sortie des pistes de PLANAS
- Permet des exercices de mastication unilatérale alternée.
- La forme en U est un conformateur de l'arcade mandibulaire
- La forme de l'arcade maxillaire respectant les valeurs de la charte de KORKHAUS favorise l'occlusion latérale.
- Le bouclier vestibulaire corrige la ventilation orale.
- Les extensions "lip bumper" neutralisent les contractions de la zone labiomentionnière et favorisent la croissance mandibulaire transversale.
- Le plan de propulsion libère la mandibule et favorise l'établissement de la déglutition secondaire.
- La langue est placée en position haute grâce aux masses bilatérales inférieures.

10 tailles

se mesure à l'aide d'un tableau de concordance correspondant à la Charte de KORKHAUS. (voir page 11)

Mastication

Des **exercices de mastication** peuvent être réalisés suivant les indications du praticien.

Toille et densité

• 10 TAILLES : 1 densité (médium)

Contre-indications

 Ne convient pas aux enfants de moins de 5 ans.

INTERCEPTION POUR CLASSE II

VENTILATION -DYSFONCTIONS LINGUALES ET LABIALES

RONCHOPATHIE (RONFLEMENT SANS APNÉE)

BRUXISME DYSFONCTIONS CRÂNIO-MANDIBULAIRES











ÉVOLUTION D'UN CAS,

à 12 mois, avec le port de la gouttière Carrée



Décembre 2010

Décembre 2011

INTERCEPTION POUR CLASSE III

VENTILATION DYSFONCTIONS
LINGUALES
ET LABIALES











LA GOUTTIÈRE CLASSE III



Enfants à partir de 5 ans

Actions

- Favorise la correction des dysfonctions linguales telles que la pulsion linguale antérieure (succion de la langue) et la déglutition primaire.
- Place la langue en position haute grâce aux masses bilatérales.
- Les extensions "lip bumper" neutralisent les contractions musculaires de la zone labiomentonnière et favorisent la croissance mandibulaire transversale.
- Le bouclier vestibulaire corrige la ventilation orale en ventilation nasale.
- Le surplomb incisif est augmenté pour la correction des articulés incisifs croisés.
- La forme en U de l'arcade mandibulaire est circonscrite dans le périmètre de l'arcade maxillaire pour favoriser l'engrènement des secteurs latéraux.

2 tailles

Toille et densité

• TAILLE SMALL, MIDDLE : 2 densités (souple, médium)

Contre-indications

 Ne convient pas aux enfants de moins de 36 mois.

ÉVOLUTION D'UN CAS, à 7 mois, avec le port de la gouttière Glasse III



Décembre 2014

Juillet 2015

LE PROCCLUSEUR

Enfants à partir de 6 ans

Actions

- · Après une phase d'interception afin de stabiliser le résultat obtenu et attendre l'éruption des secteurs latéraux grâce aux pistes de quidage de l'occlusion.
- En contention après traitements multibagues. Indentations de 14 à 24 et de 34 à 44. Les pistes postérieures libèrent l'occlusion molaire pour une mise en fonction physiologique.
- Rééducation de la ventilation nasale.
- Il peut aider à lever une supraclusion.
- Le proccluseur existe aussi en gamme modulable (page 13).



8 tailles

se mesure à l'aide d'une réglette. (voir page 11)

Toille et densité

• 8 TAILLES: **1 densité** (médium)

Contre-indications

- Ne convient pas aux enfants de moins de 6 ans.
- · Occlusion de Classe III.

INTERCEPTION CONTENTION















APPAREILS AUXILIAIRES AU TRAITEMENT MULTIBAGUES









Gouttière bagues uni-maxillaire avec masses bi-latérales

LES GOUTTIÈRES BAGUES



Uni-moxilloire

avec masses bi-latérales

Bi-maxillaires

- avec masses bi-latérales
- sons masses bi-latérales

Actions

- · La présence de masses bi-latérales permet de continuer la rééducation combinée de la déglutition et de la posture linguale.
- · Favorise l'établissement de la ventilation nasale
- Favorise le travail des tractions intermaxillaires en placant les arcades dentaires en bout à bout (possibilité d'adapter l'appareil en le coupant avec des ciseaux).
- Protège les tissus mous (lèvres, joues) lors de la période d'adaptation aux multibagues.
- Gouttière bagues uni-maxillaire : aide à la rééducation linguale lorsque seule l'arcade maxillaire est baquée.

Toille et densité

• TAILLE UNIQUE: 1 densité (médium)

Contre-indications

- Ne convient pas aux enfants de moins de 6 ans.
- Occlusion de Classe III.
- Respirateurs buccaux exclusifs.





COMMENT CHOISIR LA TAILLE DES APPAREILS ?

(i)

- La taille **small** : moins de 6 ans.
- La taille **middle** : 6 ans et plus.
- La gouttière carrée se mesure à l'aide d'un tableau de concordance correspondant à la Charte de Korkhaus:

Somme des diamètres mésiodistaux des 4 incisives supérieures	Taille de la gouttière carrée
SI = 25	1
SI = 26,2	2
	3
SI = 28,7	4
SI = 30	5
SI = 31,2	6
SI = 32,5	7
SI = 33,7	8
	9
SI = 36,2	10

- La taille large : secondes molaires comprises.
- La taille X-large : adultes grandes arcades.
- Le proccluseur se mesure à l'aide d'une réglette "Taille réelle" :



MESURER AU MAXILLAIRE : DES FACES DISTALES DE 22 À 12 AU 1/3 INFÉRIEUR DES FACES VESTIBULAIRES

COMMENT CHOISIR LA DENSITÉ DE L'APPAREIL ?



	Confort	Solidité	Supraclusion	Occlusion	Bruxisme
Densité souple	++				
Densité médium	+	+	+	+	
Densité rigide		++	++	++	++
Bi-densité souple/médium	++	+	+	+	
Bi-densité médium/rigide	+	++	++	++	++

APPAREILS INDIVIDUALISÉS LA GAMME **MODULABLE**









LA GAMME MODULABLE

- Permet d'obtenir une qouttière individualisée SANS phase de laboratoire.
- Pas de prise d'empreinte : confort du patient.
- · Réalisation de la gouttière au cabinet: gain de temps.

Contre-indications

- Ne convient pas aux enfants de moins de 6 ans.
- Occlusion de Classe III.

Les vidéos du montage des appareils sont disponibles sur :

(i) www.innovapharm.fr / fiches produits en étant connecté sur votre espace pro ou sur Youtube.

LA GOUTTIÈRE CLASSE II **MODULABLE**



Enfants à partir de 6 ans

Actions

- Les extensions "lip bumper" neutralisent les contractions musculaires de la zone labio-mentonnière et favorisent la croissance mandibulaire transversale.
- L'arcade mandibulaire est circonscrite dans le périmètre de l'arcade maxillaire pour favoriser l'engrènement des secteurs latéraux

Taille unique (middle)





PANACHEZ LES APPAREILS

AYANT LE MÊME PRIX, POUR PROFITER DES TARIFS DÉGRESSIFS TOUTE L'ANNÉE.

LE PROCCLUSEUR **MODULABLE**



Enfants à partir de 6 ans

Actions

- · Après une phase d'interception afin de stabiliser le résultat obtenu et attendre l'éruption des secteurs latéraux grâce aux pistes de guidage de l'occlusion.
- En contention après traitements multibagues permet une individualisation de l'appareil (en tenant compte de la largeur des arcades, de la variabilité des formes et des axes coronaires). Les pistes postérieures libèrent l'occlusion molaire pour une mise en fonction physiologique.
- **Rééducation** de la ventilation nasale

8 tailles

se mesure à l'aide d'une réglette. (voir page 11)

LE FONCTIONNEL FO **MODULABLE**



Enfants à partir de 8 ans

Actions

- Propulsion mandibulaire par le plan de glissement inférieur.
- Rééducation de la posture linguale et de la déglutition par les masses bilatérales inférieures plaçant la langue en position haute.
- **Développement** de la ventilation nasale par l'écran vestibulaire.
- Expansion transversale maxillaire.
- Effet "Monobloc".

Taille unique (middle)

APPAREILS INDIVIDUALISÉS LA GAMME **MODULABLE**











NOS SERVICES POUR VOS PATIENTS

LES LIVRETS

LIVRET D'ORTHODONTIE FONCTIONNELLE

Ce livret est destiné aux parents de vos patients. Il les informe sur l'intérêt de la rééducation fonctionnelle, en abordant les notions de ventilation, de déglutition, de mastication et de posture.

LIVRET DU PATIENT

Ce livret est destiné aux patients. Il les conseille notamment sur l'hygiène dentaire, le port de leur appareil et son entretien. Il optimise le suivi de leur traitement.

NOUVEAUTÉ CARNET DE TRAITEMENT

Ce nouvel outil accompagne votre patient, fiches pratiques

autocollants pense-bêtes. Le carnet de traitement sera votre meilleur allié pour motiver votre patient.





OFFI!

j'accompagne vos patients sur tous les outils d'aide à la communication et tout au long de l'espace particulier du site internet, pour optimiser leur traitement.



LES FICHES

LES FICHES CONSEILS ET PRATIQUES

Elles sont à télécharger gratuitement sur :

www.innovapharm.fr/

espace particulier / fiches conseils

LES FICHES D'INFORMATIONS ET LA FICHE DE PORT

Elles sont offertes sous format papier lors de votre commande.

LES VIDÉOS POUR VOS PATIENTS

Vos patients peuvent les visionner sur :

www.innovapharm.fr

ou sur Youtube

en tapant Innova Pharm

Notre mascotte OFFI explique comment optimiser le traitement fonctionnel.



NOTRE SITE INTERNET

ESPACE PARTICULIER

UN ESPACE DÉDIÉ À VOS PATIENTS OÙ ILS PEUVENT DÉCOUVRIR

Des informations sur les troubles fonctionnels, les fiches conseils, les questions fréquentes et la rubrique "mon traitement en vidéos".

Notre mascotte OFFI accompagne votre patient tout au long de l'espace particulier.



ONGLET PROFESSIONNEL

Pour accéder à l'espace professionnel, merci de vous inscrire sur le site (la validation est réalisée dans les 24h, du lundi au vendredi). Vous aurez alors accès à toutes les informations complémentaires, aux tarifs, aux bulletins d'inscription pour les formations, au site marchand pour effectuer vos commandes.

DES INFORMATIONS DÉTAILLÉES

Elles vous permettront de découvrir et d'apprécier notre gamme d'appareils fonctionnels.

LE SITE MARCHAND

Il vous offre la liberté de commander quand vous le souhaitez et de régler par chèque, carte bancaire ou par virement.

NOS VIDÉOS

- Le déglutix
- Le port et l'entretien de l'appareil
- La ventilation
- Le montage des appareils individualisés (gamme modulable)

NOTRE SITE INTERNET

ESPACE PROFESSIONNEL

Découvrez notre site:

www.innovapharm.fr



NOS SOLUTIONS EN ORTHODONTIE



	DYSFONCTIONS					PARAFONCTIONS		
	Ventilation	Déglutition	Posture linguale	Compétence labiale	Mastication	Succion doigt	Tétage langue, lèvre	Sucette
4 à 8 ans	EO / Gt CFP Gt Carrée Gt*	Gt CFP / Gt* Gt Carrée Déglutix	Gt CFP / Gt* Gt Carrée	EO	Gt Carrée	Déglutix EO / EOB	EO / Gt CFP Gt* Gt Carrée Déglutix	Déglutix EO / EOB
8 à 12 ans	EO / Gt* Gt Carrée	Gt* Gt Carrée Déglutix	Gt* Gt Carrée	EO	Gt Carrée	Déglutix EO / EOB	Gt* Gt Carrée Déglutix	
12 à 16 ans	EO / Gt* Gt Carrée	Gt* Gt Carrée	Gt* Gt Carrée	EO	Gt Carrée		Gt* Gt Carrée	
Adultes	EO Gt Cl2 / Gt Cl1 Gt Carrée	Gt Cl2 / Gt Cl1 Gt Carrée	Gt Cl2 Gt Carrée	EO	Gt Carrée			

Déglutix / EO : Écran Orthodontique / **EOB :** Écran Orthodontique avec Butée **Gt CFP :** Gouttière Correction Fonction Prévention / **Gt Cl1 :** Gouttière Classe I **Gt Cl2 :** Gouttière Classe II standard ou bi-densité / **Gt Cl3 :** Gouttière Classe III

Gt Carrée: Gouttière Carrée

Gt Bagues : Gouttière Bagues bi-maxillaire ou uni-maxillaire

PRO: Proccluseur / PRO m: Proccluseur modulable

F0 m : Fonctionnel 0 modulable

Gt*: Gouttière selon la classe dentaire (I, II ou III)

	ANOMALIES DENTAIRES								
	Classe 1 DDM	Classe 1 deep bite	Classe 1 open bite	Classe 2 deep bite	Classe 2 open bite	Classe 2 unilatérale	Classe 3 articulé incisif croisé	Articulé croisé latéral	
4 à 8 ans	Gt CFP Gt Cl1 Gt Carrée	Gt CFP Gt Cl1 Gt Carrée	Gt CFP Gt Cl1 Gt Carrée	Gt CFP Gt Cl2 Gt Carrée	EOB / Gt CFP Gt Cl2 Gt Carrée	Gt Carrée / Gt Gt CFP Gt Cl2	Gt Cl3	Gt* Gt Carrée	
8 à 12 ans	PRO / Gt Cl1 Gt Carrée	PRO / Gt Cl1 Gt Carrée	Gt Cl1 Gt Carrée	Gt Cl2 Gt Carrée PRO	Gt Cl2 Gt Carrée	Gt Cl2 Gt Carrée PRO	Gt Cl3	Gt* Gt Carrée	
12 à 16 ans	PRO / Gt Cl1 Gt Carrée	PRO / Gt Cl1 Gt Carrée	Gt Cl1 Gt Carrée	Gt Cl2 Gt Carrée PRO	Gt Cl2 Gt Carrée	Gt Cl2 Gt Carrée PRO	Gt Cl3	Gt* Gt Carrée	
	ANOMALIES DENTO-SQUELETTIQUES				GUES	J C	о ОТНІЕ	TION	

	DEN	ANOM TO-SQU	NALIES ELETTIG)UES	AGUES	MULTIBAGUES BRUXISME DCM	RONCHOPATHIE	SATION
	Classe 2 pro maxillie	Classe 2 rétro mandibulie	Classe 2 pro / rétro	Classe 3 modérée	MULTIB	BRUX	RONCHO	CONTENTION STABILISATION
4 à 8 ans	Gt CFP Gt Cl2 Gt Carrée	Gt CFP Gt Cl2 Gt Carrée	Gt CFP Gt Cl2 Gt Carrée	Gt Cl3		Gt* Gt Carrée	Gt* Gt Carrée	Gt Cl1 Gt Carrée
8 à 12 ans	F0 m	F0 m	F0 m	Gt Cl3	Gt Bagues	Gt* Gt Carrée	Gt* Gt Carrée	PRO / PRO m Gt Cl1 Gt Carrée
12 à 16 ans	F0 m	F0 m	F0 m	Gt Cl3	Gt Bagues	Gt* Gt Carrée	Gt* Gt Carrée	PRO / PRO m Gt Cl1 Gt Carrée
Adultes					Gt Bagues	Gt* Gt Carrée	Gt Cl1 Gt Cl2 Gt Carrée	PRO / PRO m Gt Cl1 Gt Carrée

MODE D'UTILISATION DES APPAREILS

Le déglutix:

Comment se positionne le déglutix en bouche? voir photo page 3.

Un port diurne de 30 minutes est nécessaire. L'enfant ne doit pas penser à son appareil. Il le porte en réalisant une autre activité qui accapare sa concentration : la lecture, la télévision ou un jeu vidéo.

Le port nocturne et les exercices ne sont pas obligatoires.

L'écran:

L'écran se positionne librement entre les dents et les lèvres.

La gouttière CFP, la gouttière Classe I, la gouttière Classe II, la gouttière Classe III, la gouttière carrée, la gouttière modulable, le F0, les gouttières bagues avec masses bi-latérales (uni ou bi-maxillaires):

La gouttière se place en bouche, les masses bilatérales vers le bas sous la langue.

La langue se place alors naturellement en haut et en avant.

Le proccluseur, le proccluseur modulable :

Des indentations de prémolaires à prémolaires sont prévues pour permettre l'évolution et le placement des dents.

La gouttière bagues sans masses bi-latérales :

La gouttière se positionne aussi bien dans un sens que dans l'autre.

Lorsque l'appareil est en bouche, la ventilation devient nasale

Le port diurne recommandé est de 2 h. Des exercices de mastication, de ventilation et de déglutition peuvent être réalisés.

Le port nocturne favorise l'établissement de la ventilation nasale réflexe, et l'automatisation de la déglutition secondaire.

Le matin, il existe une sensibilité sur les dents antérieures ; elle disparaît rapidement et témoigne de l'action de la gouttière sur le bloc incisivo-canin. Les premiers temps (jusqu'à 4 semaines environ), le patient perd souvent sa gouttière la nuit : c'est normal il faut persévérer car la rééducation fonctionnelle est un processus long.

CODE COULEUR DES APPAREILS

Vert : densité souple

Bleu: densité médium

Jaune : densité rigide



ENTRETIEN DES APPAREILS

- Tous nos appareils se nettoient à l'eau froide avec brosse à dents et dentifrice, avant et après chaque utilisation.
- Il est recommandé de placer l'appareil 1 heure par semaine dans un bain de bouche.
- Ne jamais le faire bouillir.
- ATTENTION L'absence d'entretien de l'appareil et de sa boîte ainsi qu'une mauvaise hygiène buccale peuvent provoquer des réactions inflammatoires.

COMPOSITION DES APPAREILS

Nos appareils sont produits à partir de matières de grade médical et de colorants alimentaires répondant aux normes FDA, USP Classe VI et ne contenant ni bisphénol, ni phtalates, ni PVC, ni perturbateurs endocriniens.



NOS JOURNÉES DE FORMATION

UNE FORMATION THÉORIQUE, PRATIQUE ET CLINIQUE.

Les dates vous sont communiquées sur :

www.innovapharm.fr/ espace professionnel, onglet formations



L'ORTHODONTIE FONCTIONNELLE, POURQUOI RÉÉDUQUER?

Les dates vous sont communiquées sur :

www.innovapharm.fr/espace professionnel, onglet formations

NOS SOIRÉES CONFÉRENCES





5 bd Pierre Lecoq • BP30451 49304 CHOLET Cedex • FRANCE

02 41 58 78 37 06 22 20 62 48

mail@innovapharm.fr



www.innovapharm.fr

